

Lietošanas intrukcija

Tualetes krēsls Stacy



- Tualetes krēsls, ar rokas balstiem, podu un vāku.
- Platums: 57cm.
- Dziļums: 51cm.
- Sēdekļa platums: 45cm.
- Sēdekļa augstums 44-59cm.
- Roku balstu augstums: 23cm.
- Krēsla svars 8,6kg.
- Maksimālā slodze 113kg.

Ja vēlaties mainīt atbalsta kājiņu augstumu: nospiediet kājiņas augstuma fiksatoru un paceliet vai nolaidiet kājiņu vēlamā augstumā. Pārliedzieties, kad Jūsu vēlamais kājiņas augstums tika nofiksēts. Atkārtojiet darbību arī ar pārējām kājiņām.

Krēslu iespējams tīrīt ar ierastiem mājāsaimniecības neabrazīviem līdzekļiem.

Pārdevējs: SAS "Slaugivita"

GARANTIJAS TALONS

Iekārtas nosaukums_ Stacy

Modelis_ Stacy_____

Sērijas Nr. _____

Pārdošanas datums: _____ PVN Fakturrēķina LAT Nr. _____

Pārdevēja uzvārds _____ Paraksts _____

Z.V.

Šim pārdodamajam ražojumam piešķirama _____12_____ mēn. garantija no pārdošanas datuma. Garantijas laikposmā tiks bezmaksas novērsti bojājumi, kas saistīti ar ražotāja materiālu kvalitāti vai ražotāja brāķi.

Garantija nav piemērojama:

Neatbilstošas uzraudzības gadījumā: Par iegūtā izstrādājuma (iekārtas) ikdienas uzraudzīšanu atbild īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona. Ja bojājums rodas nolaidības dēļ, izpildot uzraudzīšanu, pārdevējam saglabājas tiesības nepiemērot garantiju.

Pārslodzes un neatbilstošas lietošanas gadījumā: t.i. kad ražojums (iekārta) lietota pārkāpjot ekspluatācijas likumus, lietošanas ne pēc piemērotības vai tīšas sabojāšanas gadījumā. **Modifikācijas gadījumā:** Ja ir mēģināt izjaukt, remontēt, modificēt ražojumu (iekārta) bez pārdošanas servisa piekrišanas vai lietoti neatbilstoši vai nepiemēroti papildus līdzekļi.

Citos gadījumos: ja ražojums(iekārta) sabojājies ugunsgrēka, ūdens appliešanas (plūdu), zemestrīču un citu stihisku nelaimes gadījumu dēļ.

Garantija piemērojama tikai iekārtas bojājumiem. SAS "Slaugivita" neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies citam īpašumam vai personām. Garantija ir spēkā iesniedzot šo garantijas talonu un pirkšanas dokumenta kopiju.

Ar garantijas nosacījumiem iepazīnos un piekrītu tiem:

Pircēja paraksts _____

Garantijas apkalpošana centra tālr.: 8 41 540204; 8 611 48081; 8 620 11394

info@slaugivita.com www.slaugivita.com

1. **Bojājums** _____

Datums: _____

Izmantotās detaļas: _____

Serviss _____

(Amats; vārds, uzvārds; paraksts)

2. **Bojājums** _____

Datums: _____

Izmantotās detaļas: _____

Serviss _____

(Amats; vārds, uzvārds; paraksts)