

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

SALVACLIP produkti ir speciāli veidoti, lai tiktu risinātas nestabilitātes problēmas, saistītas ar fizisko vai psihisko nespēku. Šie produkti neļauj pacientiem noslidēt no ratiņkrēsla vai krēsla, nogāzties un ievainoties. SALVACLIP produkti izpilda nostiprināšanas funkciju un **tos drīkst lietot tikai pēc ārsta norādījuma.**

Ievērojiet slimnīcas, pansionāta vai slimnieku kopšanas slimnīcas noteikumus, ar kuriem tiek reglamentēta pacientu fiksācija. Fiziskām personām stingri jāievēro ģimenes ārsta - terapeita norādījumi.

Pirms produkta lietošanas sākšanas, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju, kura atrodas katra SALVACLIP produkta iepakojumā. **Nelietojiet** SALVACLIP produktus, ja neesat pārliecinājušies, ka instrukcija tika saprasta pareizi.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet ražotāja pārstāvim: UAB "Slaugivita", Rēkyvos 24b, Šauļos, bezmaksas tālruņa līnija 8 800 00225, www.slaugivita.com

UZMANĪBU:

- Nepareiza fiksācijas un pieturēšanas produktu lietošana var izraisīt nopietnus bojājumus, kā arī pacienta sažņaugšanu.
- Regulāri novērojiet pacienta piestiprināšanu, atbilstoši prasībām, kuras ir norādītas Jūsu iestādes noteikumos.
- SALVACLIP produktus nedrīkst lietot citiem mērķiem.

Rūpīgi ievērojiet sekojošus norādījumus:

1. Pareizi izvēlieties SALVACLIP produktu, ņemot vērā krēsla tipu vai virsmu, uz kuras gul pacients.

Ratiņkrēslam:

- SALVACLIP vestes, kodi SCP4000 un 4050
- SALVACLIP vestes, kodi SCP4100, 4150, 4200 un 4250
- SALVACLIP siksnas, kodi SCP4300 un 4275

Krēslam:

- SALVACLIP vestes, kodi SCP4000 ir 4050
- SALVACLIP siksnas, kodi SCP4300 ir 4275

Gultai vai nestuvēm:

- SALVACLIP elastīga gultas sikсна SCP4500

Palīdzībai staigāšanai:

- SALVACLIP sikсна SCP4400 ir 4450
- SALVACLIP elastīga palīdzības sikсна SCP4550

2. Pareizi izvēlieties produkta izmēru, ņemot vērā pacienta ķermeņa uzbūvi:
 - Standarta vai Universāls izmērs
 - Izmērs L lieliem pacientiem
3. Pārbaudiet produktu pirms lietošanas. Bieži produktu lietojot un mazgājot, tiek bojāta ražojuma struktūra. Ja tika pamanītas izmaiņas – bojājumi, izirušas vīles, noberzētas vietas, nomainiet produktu pret jaunu. Lai izvairītos no pacienta ievainošanas, nelietojiet bojātu produktu.

Apkope:

- SALVACLIP produkti ir ugunsnedroši. Nenovietojiet tos atklātas uguns un degošas cigaretes tuvumā.
- SALVACLIP produkti ir izgatavoti no kokvilnas/poliestera, mazgāšanas temperatūra - 40°C. Produkta mazgāšanas instrukcija ir norādīta uz etiķetes.
- Lai nodrošinātu stingru fiksāciju, no līplentes regulāri noņemiet pūkas un diegus.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

SALVACLIP produkti ir speciāli veidoti, lai tiktu risinātas nestabilitātes problēmas, saistītas ar fizisko vai psihisko nespēku. Šie produkti neļauj pacientiem noslidēt no ratiņkrēsla vai krēsla, nogāzties un ievainoties. SALVACLIP produkti izpilda nostiprināšanas funkciju un **tos drīkst lietot tikai pēc ārsta norādījuma.**

Ievērojiet slimnīcas, pansionāta vai slimnieku kopšanas slimnīcas noteikumus, ar kuriem tiek reglamentēta pacientu fiksācija. Fiziskām personām stingri jāievēro ģimenes ārsta - terapeita norādījumi.

Pirms produkta lietošanas sākšanas, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju, kura atrodas katra SALVACLIP produkta iepakojumā. **Nelietojiet** SALVACLIP produktus, ja neesat pārliecinājušies, ka instrukcija tika saprasta pareizi.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet ražotāja pārstāvim: UAB "Slaugivita", Rēkyvos 24b, Šauļos, bezmaksas tālruņa līnija 8 800 00225, www.slaugivita.com

UZMANĪBU:

- Nepareiza fiksācijas un pieturēšanas produktu lietošana var izraisīt nopietnus bojājumus, kā arī pacienta sažņaugšanu.
- Regulāri novērojiet pacienta piestiprināšanu, atbilstoši prasībām, kuras ir norādītas Jūsu iestādes noteikumos.
- SALVACLIP produktus nedrīkst lietot citiem mērķiem.

Rūpīgi ievērojiet sekojošus norādījumus:

4. Pareizi izvēlieties SALVACLIP produktu, ņemot vērā krēsla tipu vai virsmu, uz kuras gul pacients.

Ratiņkrēslam:

- SALVACLIP vestes, kodi SCP4000 un 4050
- SALVACLIP vestes, kodi SCP4100, 4150, 4200 un 4250
- SALVACLIP siksnas, kodi SCP4300 un 4275

Krēslam:

- SALVACLIP vestes, kodi SCP4000 ir 4050
- SALVACLIP siksnas, kodi SCP4300 ir 4275

Gultai vai nestuvēm:

- SALVACLIP elastīga gultas sikсна SCP4500

Palīdzībai staigāšanai:

- SALVACLIP sikсна SCP4400 ir 4450
- SALVACLIP elastīga palīdzības sikсна SCP4550

5. Pareizi izvēlieties produkta izmēru, ņemot vērā pacienta ķermeņa uzbūvi:
 - Standarta vai Universāls izmērs
 - Izmērs L lieliem pacientiem
6. Pārbaudiet produktu pirms lietošanas. Bieži produktu lietojot un mazgājot, tiek bojāta ražojuma struktūra. Ja tika pamanītas izmaiņas – bojājumi, izirušas vīles, noberzētas vietas, nomainiet produktu pret jaunu. Lai izvairītos no pacienta ievainošanas, nelietojiet bojātu produktu.

Apkope:

- SALVACLIP produkti ir ugunsnedroši. Nenovietojiet tos atklātas uguns un degošas cigaretes tuvumā.
- SALVACLIP produkti ir izgatavoti no kokvilnas/poliestera, mazgāšanas temperatūra - 40°C. Produkta mazgāšanas instrukcija ir norādīta uz etiķetes.
- Lai nodrošinātu stingru fiksāciju, no līplentes regulāri noņemiet pūkas un diegus.