

Lietotāja rokasgrāmata

06.11.2018.

CuroCell S.A.M.® PRO

Statistsks pretizgļējumu matracis

Lietotāja rokasgrāmatas daļas numurs: 95-001410-EN0000



Saturs

Svarīgas drošības instrukcijas	3
Ievads	4
Produkta apraksts	5
Uzstādīšana un palaide	8
Tīrīšana un atjaunošana	10
Uzglabāšana	11
Uzturēšana	12
Traucējummeklēšana	13
Tehniskais apraksts	14
Rezerves daļas	16
Opcijas un piederumi	18
Garantija	19
Cita informācija	20
Jūsu piezīmes	21

SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Pirms lietošanas izlasiet visus norādījumus

BRĪDINĀJUMS! Lai līdz minimumam samazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai miesas bojājumu risku:

1. Produkts izmantojams tikai paredzētajam nolūkam, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā. Produktu nedrīkst kombinēt, montēt vai remontēt ar citām daļām (piemēram, sūkni un matraci), papildierīcēm vai rezerves daļām, kas nav aprakstītas šajā rokasgrāmatā vai citā Zviedrijas aprūpes dokumentācijā.
2. Nelietojiet sūkni mitrās telpās, ja pastāv risks, ka sūknis var nonākt saskarē ar ūdeni vai citu šķidrumu. Nekad neizmantojiet sūkni, kas nonācis saskarē ar ūdeni/šķidrumu. Nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no elektriskā tīkla kontaktligzdas un nosūtiet izstrādājumu pilnvarotam servisa tehnikam apkopes veikšanai.
3. **NELIETOT** tuvu vai saskarē ar uguns avotiem/karstām virsmām, piemēram, ugunsкура, degošu cigarešu vai karstu lampu tuvumā vai saskarē ar tiem. Lai gan produktam ir veikta ugunsdrošības testēšana, tas var tikt bojāts, nonākot saskarē ar uguns avotiem.
4. Novietojiet un izmantojiet produktu tādā veidā, lai tas netiktu nosprostots vai sabojāts. **PIEZĪME:** Izmantojot gultas margas, īpaši uzmanieties no iesprūšanas radītiem bojājumiem, saspiešanas ievainojumiem.
5. Nekādā gadījumā nelietojiet izstrādājumu, ja ir bojāts sūkņa strāvas vads vai kontaktdakša, ja sūkņa korpuss ir bojāts vai nedarbojas pareizi. Sazinieties ar pilnvarota servisa tehniķi, lai veiktu pārbaudi un remontu.
6. Regulāri pārbaudiet produkta funkcionalitāti, izmantojot rokas pārbaudes paņēmieni (skatīt 3.4. sadaļu). Tāpat pārbaudiet, vai komforta iestatījums ir pareizs, kā norādīts tabulā uz sūkņa.
7. Ja produkts tiek izmantots personām ar īpašas uzraudzības nepieciešamību, piemēram, bērniem, lietotājam jānodrošina pastāvīga uzraudzība.
8. Matracis ir aizsargāts ar higiēnisku pārvalku. Centieties izvairīties no vairāku matrača higiēnas pārvalku lietošanas vienlaicīgi. Pastāv risks, ka var tikt sagrauta tvaika caurlaidības spēja.
9. Higiēniskais pārvalks neļauj iekļūt šķidrumam vai gaisam, taču tas laiž cauri tvaiku (tvaiki ir kaitīgi). Pārļiecinieties, ka pacients ir novietots pareizi, lai izvairītos no nosmakšanas riska.
10. Novērsiet asu priekšmetu izraisītus higiēniskā apvalka bojājumus.
11. Ja apvalks ir aprīkots ar rokturiem uz garajām malām, šos rokturus paredzēts izmantot tikai paša matrača pacelšanai un pārvietošanai. Jūs uzņematies atbildību par jebkāda cita veida lietojumiem, un uz tiem netiek attiecināta produkta garantija.
12. Sūkņa strāvas vads jāizvieto tā, lai līdz minimumam samazinātu izslēgšanas risku; ja iespējams, izmantojiet kabeļa turētāju.
13. Pastāv nosmakšanas risks, ja strāvas vads nejauši aptinas ap lietotāja kaklu; ja iespējams, izmantojiet kabeļa turētāju un pārļiecinieties, ka pacients gultā guļ pareizi un atbilstoši instrukcijām.

1. Ievads

CuroCell S.A.M.® PRO ir statisks gaisa matracis, ko var izmantot visa veida aprūpes vidēs, un tas ir ļoti funkcionāls un rentabls.



Pirms lietošanas vienmēr izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.

1.1 Vispārīga informācija

Šī sistēma ir medicīnas ierīce ar Medicīnas ierīču direktīvas 93/42/EEK prasībām atbilstošu CE marķējumu. Saskaņā ar varas iestāžu izstrādātajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē medicīnas ierīču lietošanu, ražotājam jāziņo par visiem negadījumiem vai starpgadījumiem, kuros iesaistīti to ražotie izstrādājumi. Mēs būtu ļoti pateicīgi, ja jebkāda informācija par nelaimes gadījumiem vai incidentiem, kuros ir iesaistīti mūsu izstrādājumi, tiktu paziņota tieši Care of Sweden.

Šī sistēma ir pārbaudīta un apstiprināta atbilstoši šādiem standartiem: EN 60601-1, SS-EN ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993, EN 597-1, EN 597-2 un EN 14126.

1.2. Paredzētais lietojums

CuroCell S.A.M.® Pro var izmantot visās medicīnas vidēs, un tas ir paredzēts, lai palīdzētu novērst un ārstēt līdz 3. kategorijas (1) izgulējumu čūlas. To var izmantot arī kā palīg līdzekli sāpju terapijā. CuroCell S.A.M.® Pro ir pastāvīgai lietošanai paredzēta statisku gaisa spilvenu sistēma.

1.3. Varianti

Izstrādājums ir pieejams kā matrača pārklājs (CuroCell S.A.M.® PRO, CuroCell S.A.M.® PRO CF10), ko novieto uz esošā matrača, vai kā kombinēts matracis (CuroCell S.A.M.® PRO CF16) ar integrētu putu pildījumu, ko novieto tieši uz gultas pamatnes.

Ieteicamais lietotāja svars šai sistēmai ir līdz 250 kg.

Mēs iesakām regulāri veikt pozīcijas izmaiņas. Laika intervāls atbildīgajam personālam ir jānovērtē atbilstoši pacienta stāvoklim, diagnozei un vispārējam stāvoklim.

Mainoties pacientiem, matracis vienmēr jānotīra.

PIEZĪME:

- Ja sistēma tiek izmantota kopā ar pozicionēšanas spilveniem, uzmanīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu pacienta pozicionēšanu.
- Ja izmantojat šo produktu ar evakuācijas palagu, lietotāja pienākums ir nodrošināt, lai to varētu droši izmantot evakuācijai.
- Atcerieties, ka pamatā esošie matračī ir svarīgi produkta funkcionalitātei.
- Šis matracis nav piemērots izmantošanai rentgena pārbaužu laikā, jo pastāv izplūdušu attēlu vai artefaktu risks, kas var radīt diagnostikas kļūdas.
- Neuzglabājiet un nelietojiet izstrādājumu tiešā saules gaismā. Izstrādājumu var sabojāt paaugstināta temperatūra un UV starojums.

(1) Valsts Spiediena čūlu konsultatīvā padome, Eiropas Spiediena čūlu konsultatīvā padome un Pan Pacific Spiediena traumu apvienība. Spiediena čūlu novēršana un ārstēšana: Ātrās uzziņas rokasgrāmatā. Emīlija Heslere (Ed.). Kembridžas medijs: Osborne Park, Western Australia; 2014.

1.4. Cita informācija

Rīcības plāns izgulējumu čūlām

Lai ar šo produktu iegūtu labākos iespējamus rezultātus, ieteicams izmantot labi plānotu un labi strukturētu darba vidi. Mūsu vadlīnijās "Rīcības plāns" jūs atradīsiet piemērus, kurus var piemērot un īstenot praksē, izmantojot mūsu produktus.

Matrača pamācība

Šī praktiskā pamācība palīdzēs jums kā aprūpētājam izvēlēties no Care of Swedens klāsta pareizo matraci. CuroCell S.A.M.[®] ir B funkciju grupas matracis. Šo informāciju var atrast mūsu tīmekļa vietnē www.careofsweden.com, vai arī pasūtīt eksemplāru mūsu klientu apkalpošanas dienestā, nosūtot savu informāciju uz info@careofsweden.se.


2. Produkta apraksts

2.1. Sūknis – Priekšpuse


1. Komforta iestatīšanas poga.
2. Vadības panelis.
3. Korpus, priekšpuse.
4. Sūkņa savienotājs.
5. Strāvas kabeļa savienotājs.
6. Strāvas slēdzis.

Izmanto, lai ieslēgtu vai izslēgtu sūkni. Zaļais indikators norāda, kad sūknis ir ieslēgts.

7. Korpus, aizmugure.

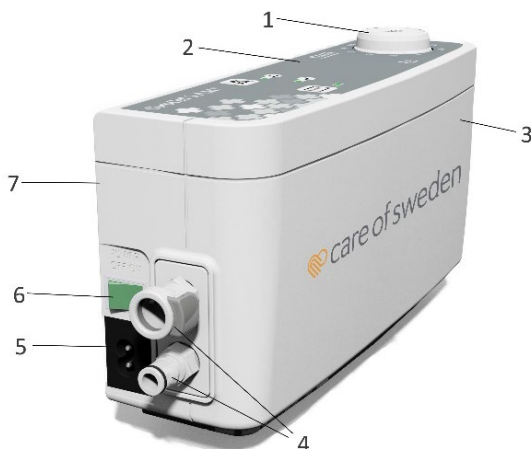

- A. Pakaramie.
- B. Drošinātāji (2 x T1A/250 V).
- C. Etiķete.
- D. Gaisa filtrs.

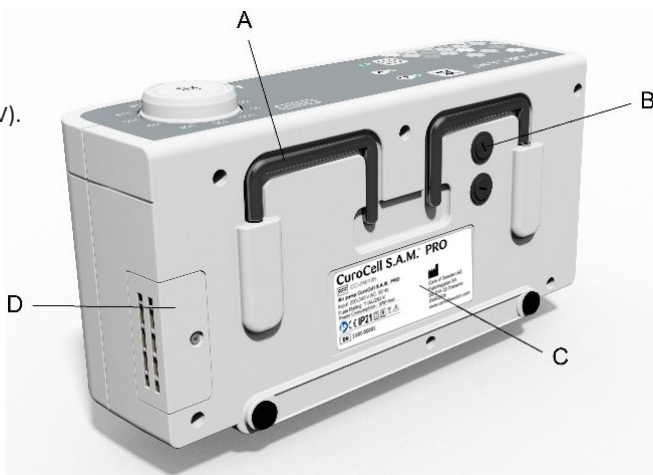

2.2. Sūkņa funkcijas – vadības panelis



Komforta iestatīšanas poga – komforta iestatījumi

Komforta iestatīšanas poga regulē gaisa spiedienu matracī. Griežot pogu pa labi, gaisa padeve un spiediens matracī palielinās. Griežot pogu pa kreisi, gaisa padeve un spiediens matracī samazinās.



Sēdus stāvoklim spiedienu ieteicams palielināt par +25 kg. Pārbaudiet, izmantojot rokas pārbaudes paņēmieni (skatīt 3.4. sadaļu).



Maksimālais spiediens (kopšanas režīms)

Ar šo funkciju viss matracis ir piepumpēts un nodrošina fiksētu atbalstu. Šī funkcija jāizmanto pacientu aprūpei, lai mainītu pacienta stāvokli vai lai pārvietotu pacientu uz gultu vai laukā no tās. Šī funkcija pēc apmēram 30 minūtēm automātiski atgriežas iepriekšējā iestatījumā.



Informācijas signāls

Ja matrača spiediens ir pārāk zems, tiek aktivizēts skaņas un vizuālais signāls.



Informācijas signāla izslēgšana

Izslēdziet skaņas signālu, nospiežot skaņas izslēgšanas pogu. Ja spiediens nenormalizējas, pēc septiņām minūtēm skaņas signāls tiek atkal aktivizēts. Ar paziņojumiem saistītu problēmu gadījumā skatiet 7. sadaļu par problēmu novēršanu.




Normāls spiediens

Kad matracis ir gatavs lietošanai, lampiņa deg vienmērīgi. Tā mirgo, kad matracī tiek sūknēts gaiss.

2.3. Matracis

1. Šūnas/gaisa pūslis
2. Caurules
3. Caurules turētājs
4. Kardiopulmonālā reanimācija (strauja gaisa izlaišana)

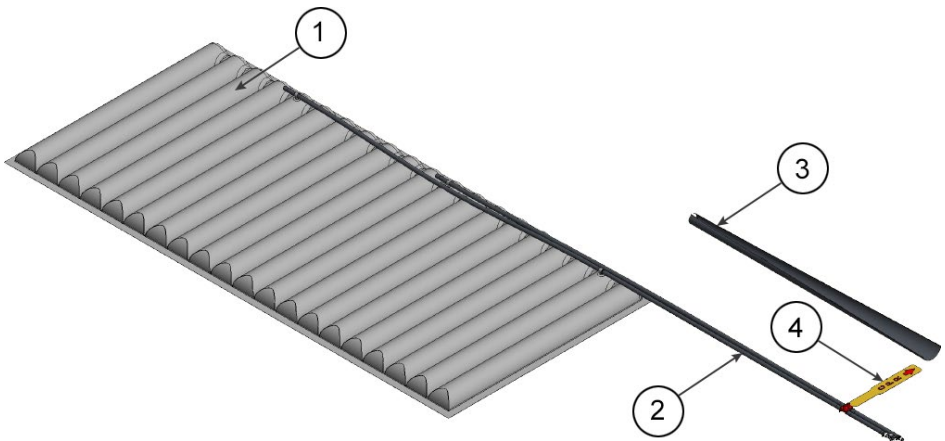

2.4. Citas daļas

Higiēniskais pārsegs

Iekšējais pārvalks, mīksts (CuroCell S.A.M.® PRO piederums)

Transportēšanas un uzglabāšanas maiss (piederums)

Integrēts putu pildījums (tikai CuroCell S.A.M.® PRO CF16)

3. Uzstādīšana un palaide

3.1. Uzstādīšana

Izsaiņojot pārbaudiet, vai nav bojātas daļas. Ja tiek konstatēti jebkādi bojājumi, konsultējieties ar Care of Sweden pirms izstrādājuma lietošanas.

1. Novietojiet matraci uz esoša matrača. Ja iespējams, nostipriniet to, pārliedot elastīgās lences pār pamata matrača stūriem un savelkot tās zem tiem.

Piezīme: Ja matracim ir integrēts putu pildījums (CuroCell S.A.M.® PRO CF16), novietojiet matraci tieši uz gultas pamatnes. Izmantojot pārvalka lences, nostipriniet matraci pie gultas pamatnes kustīgajām daļām.

2. Pakariniet sūkni gultas kājgalī vai novietojiet to uz līdzenas un stabilas virsmas. Izvietojiet strāvas vadu tā, lai tas neradītu pakļūšanas risku, lai tam nevarētu pārbraukt pāri ar gultas riteņiem vai lai tas neiesprūstu, paceļot vai nolaižot gultu.

3. Pievienojiet matrača gaisa caurules pie pieslēgvietām sūkņa sānos. Ja sūknis un šļūtenes ir aprīkotas ar ātrajiem savienotājiem, tos pareizi savienojot, atskan sadzirdams klikšķis.

4. Pārbaudiet, vai strāvas slēdzis ir iestatīts stāvoklī "0" (Izslēgts). Pievienojiet strāvas vadu apstiprinātam strāvas izvadam (110 vai 220 V atkarībā no valsts un elektriskā tīkla sprieguma).

PIEZĪME:

- Lai palielinātu lietotāja komfortu, uzklājiet gultai palagus.
- Pārbaudiet, vai CPR vārsts ir aizvērts.
- Pārliedcinieties, ka gultā ir ievietots atbilstoša izmēra matracis.

3.2. Palaide un iestatījumi



LŪDZAM ŅEMT VĒRĀ: Pirms lietošanas vienmēr izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.

1. Palaidiet sūkni, pārslēdzot slēdzi sūkņa sānos stāvoklī "1" (Ieslēgts).

2. Sūknis sāk piepildīt matraci ar gaisu. Piepūšanas fāzē mirgos zaļš ✓ simbols; matrača piepildīšana ar gaisu aizņem aptuveni 15 minūtes.

3. Kad ✓ simbols deg ar nepārtrauktu zaļu gaismu, matracis ir gatavs lietošanai.

3.3. Komforta iestatījumi

Gaisa spiedienu matracī var noregulēt atbilstoši pacienta vēlmēm attiecībā uz komfortu. Par pareizajiem iestatījumiem vienmēr konsultējieties ar ārstēšanas kursu nozīmējušo personu vai citu pilnvarotu personālu.

Atbilstošo gaisa spiedienu atlasa, izmantojot pogu (0–250 kg). Izvēlieties, vadoties pēc ciparu skalas. Sēdus stāvoklī spiedienu ieteicams palielināt par +25 kg. Pārbaudiet, izmantojot rokas pārbaudes paņēmienu (skatīt 3.4. sadaļu).

PIEZĪME:

- Paceļot gultas galvgali, spiediens jāpalielina par 25 kg.
- Kad tiek noslogota tikai daļa no matrača, piemēram, lietotājiem ar amputētiem locekļiem, spiediens jāpalielina (par 1-2 iedaļām). Pēc tam veiciet pārbaudi, izmantojot rokas pārbaudes paņēmieni (skatīt 3.4. sadaļu).

3.4. Pārbaude ar roku, spiediena iestatīšana

Pārbaudi ar roku izmanto, lai nodrošinātu, ka matracis darbojas pareizi. Tā regulāri jāveic vienu reizi maiņas laikā, pēc stāvokļa izmaiņšanas gultā vai mainot komforta iestatījumus.

Atveriet pārvalku. Novietojiet plaukstu zem gaisa šūnām tieši zem lietotāja iegurņa reģiona un pārlicinieties, ka lietotājs neguļ tieši uz apakšējā matrača. Ieteicams, lai apakšējie matračī būtu aptuveni pirksta biezumā.

Ja mala ir pārāk liela vai pārāk maza, jāpalielina vai jāsamazina komforta iestatījumus līdz nākamajai augstākai vai zemākai iedaļai. Pagaidiet 10 minūtes un no jauna veiciet pārbaudi ar roku.



3.5. Kardiomanipulārā reanimācija

Ja ārkārtējās situācijās nepieciešams veikt kardiomanipulāro reanimāciju (CPR): Strauji uzvelciet CPR lenci uz caurulēm starp sūkni un matraci. Lai paātrinātu gaisa izvadīšanu, atvienojiet ātros savienotājus sūkņa sānos.

PIEZĪME: Pārlicinieties, ka CPR savienotājs ir pareizi savienots pēc lietošanas.



3.6. Zems spiediens

Ja gaisa spiediens ir nesamērīgi zems, problēmas novēršanas procedūras skatiet 7. sadaļā.

3.7. Transportēšanas funkcija

Atvienojiet abas caurules no sūkņa un savienojiet tās kopā; matracis ir pārveidots izmantošanai transportēšanas režīmā. Šo funkciju iesakām izmantot tikai īslaicīgi.

Piezīme:

Ja gaisa spiediens joprojām ir zems, pārbaudiet, vai nav bojāts matracis un caurules. Salabojiet, ja vajadzīgs, vai sazinieties ar piegādātāju.

4. Tīrīšana un atjaunošana

Pirms izstrādājuma izmantošanas citam lietotājam, ir svarīgi ievērot tālāk sniegtos norādījumus. Šaubu gadījumā konsultējieties ar higiēnas vadītāju vai piegādātāju, lai saņemtu palīdzību un instrukcijas.

4.1. Tīrīšana

SŪKNIS

BRĪDINĀJUMS!

Neatveriet sūkņa korpusu – elektriskās strāvas trieciena risks. Apkope un uzturēšana jāveic pilnvarotiem tehniķiem. Nesamitriniet sūkni un neiegremdējiet to nevienā šķidrumā.



Noslaukiet sūkni ar mitru drāniņu un vieglu tīrīšanas šķīdumu, kas paredzēts šim nolūkam, piemēram, alkoholu ar vai bez tensīdiem, izopropanolu 70%, oksidācijas šķīdumiem vai hloru maks. 1%. Ja lietojat citu līdzekli, izvēlieties tādu, kas neietekmē sūkņa korpusa plastmasu.

MATRAČĀ APVALKS



Apvalkus var noslaucīt ar mitru drāniņu un vieglu tīrīšanas šķīdumu, kas paredzēts šim nolūkam, piemēram, spirtu ar vai bez virsmaktīvām vielām, 70% izopropanolu, oksidējošo šķīdumu vai maks. 1% hlora šķīdumu. Ekskrementi un asins plankumi ir nekavējoties jānotīra ar aukstu ūdeni. Rūpīgi sekojiet līdzī vietējām instrukcijām un tīrītāja lietošanas instrukcijām.



Daudzslāņu apvalki pirms mazgāšanas jāsadala. Dažādas daļas jāmazgā kopā ar līdzīgas krāsas audumiem.



Tīrīšanas līdzekļi uz hlora un fenola bāzes var negatīvi ietekmēt PU virsmu, tādēļ no to izmantošanas ir jāizvairās. Izmantojot hloru, mēs iesakām maisījumu maks. 1%.

IEKŠĒJAIS MĪKSTĀIS PĀRSEGS (piederums)



Notīriet skarto zonu ar mitru drāniņu un vieglu tīrīšanas šķīdumu, kas paredzēts šim nolūkam, piemēram, alkoholu ar vai bez tensīdiem, izopropanolu 70%, oksidācijas šķīdumiem vai hloru maks. 1%.

4.2. Atjaunošana

SŪKNIS

Instrukcijas skatiet 4.1. sadaļā.

MATRACIS

1. Pievienojiet sūkņa caurules un izlaidiet gaisu no matrača. Atveriet arī CPR vārstu.
2. Noņemiet apvalku. Sīkāku informāciju par pārvalku tīrīšanu skatiet 4.1. sadaļā. Ja produkts ir aprikots ar putu pildījumu, tas ir jāizņem un jātīra atsevišķi.
3. Pārvietojiet matraci uz tīrīšanas procedūrai piemērotu tīru zonu.
4. Noslaukiet šūnas, visas caurules un CPR vārstu ar vieglu tīrīšanas šķīdumu, kas paredzēts šim nolūkam, piemēram, alkoholu ar vai bez tensīdiem, izopropanolu 70%, oksidācijas šķīdumiem vai hloru maks. 1%.
5. Noslaukiet un dezinficējiet visas darba virsmas ar šim nolūkam paredzētu tīrīšanas līdzekli uz spirta bāzes.
6. Salieciet kopā matraci. Ja caurules kāda iemesla dēļ atvienojas no šūnām, tās ir jāpievieno vēlreiz, kā parādīts ilustrācijā 2.3. sadaļā. Aizveriet CPR vārstu.

PUTU PILDĪJUMS (CuroCell S.A.M.® PRO CF16)



Notīriet skarto zonu ar mitru drāniņu un vieglu tīrīšanas šķīdumu, kas paredzēts šim nolūkam, piemēram, spirtu ar vai bez virsmaktīvām vielām, 70% izopropanolu, oksidējošiem šķīdumiem vai maks. 1% hlora šķīdumu.

Maigi izspiediet visu ūdeni. NB! Lai izvadītu ūdeni, neizgrieziet un nesaritīniet spilvenu. Ļaujiet spilvenam izžūt siltā, vēdināmā vietā (nevis tiešā saules gaismā). Pirms atkārtotas lietošanas spilvenam jābūt pilnīgi izžuvušam.

PIEZĪME:

Pārbaudiet higiēnisko apvalku ikreiz, kad produkts tiek tīrīts. Ja tas ir bojāts, tas jānomaina vai jālabo. Tīrīšanas laikā pārbaudiet arī sūkni, cauruļu savienotājus un strāvas vadu.

Bojātas daļas ir jānomaina vai jālabo.

5. Uzglabāšana

Matraci un sūkni ieteicams uzglabāt izstrādājuma maisā (piederums). Ievietojiet sūkni tā, lai matracs to aizsargātu. Uzmanīgi apejieties ar iepakotu izstrādājumu. Nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus. Sūknis jāuzglabā sausā vidē, telpā, nepakļaujot tiešas saules gaismas iedarbībai.

6. Uzturēšana

1. Pārbaudiet, vai strāvas vadam un kontaktdakšai nav bojājumu un skrāpējumu.
2. Pārbaudiet matrača pārvalku, lai pārlicinātos, ka tas nav bojāts, ka tas pārseidz matraci, un ka šūnas ir samontētas pareizi.
3. Pārbaudiet, vai gaiss plūst izvadiem sūkņa sānos.
4. Pārbaudiet, vai nav bojātas vai saspīestas caurules vai savienotāji.

Jautājumos, kas saistīti ar rezerves daļām sazinieties ar ražotāju vai vietējo izplatītāju.

6.1. Gaisa filtrs un drošinātāju mainīšana


Gaisa filtrs (A):

1. Izmantojot skrūvgriezi, atslābiniet mazo aizsargvāciņu sūkņa aizmugurē.
2. Izņemiet filtru no turētāja.
3. Ievietojiet jauno filtru turētājā, uzstādiet aizsargvāciņu atpakaļ vietā un nostipriniet to ar skrūvēm.



Drošinātāji (B):

1. Izmantojot skrūvgriezi, noņemiet drošinātāja turētāju.
2. Nomainiet veco drošinātāju ar jaunu, kas marķēts ar T1A/250 V; ņemiet vērā, ka ir divi drošinātāji.
3. Izmantojiet skrūvgriezi, lai novietotu drošinātāja turētāju atpakaļ vietā.

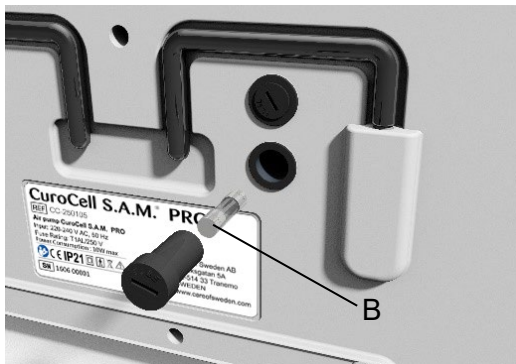

7. Traucējummeklēšana

Problēma	Risinājums
Sūknis nedarbojas	Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots kontaktligzdai. Pārbaudiet, vai visi drošinātāji ir darba kārtībā.
Sūknis darbojas, bet matracis netiek piepumpēts	Pārbaudiet, vai gaiss plūst no sūkņa, un vai strāvas vads ir pievienots pareizi. Ja sūknis darbojas normāli, bet gaiss neplūst, sūknim jāveic apkope. Pārbaudiet, vai CPR vārsts ir aizvērts. Pārbaudiet, vai nav bojāts matracis un matrača savienotājs. Pārbaudiet, vai nav bojātas caurules. Pārbaudiet, vai nav aizsērējis gaisa filtrs.
Lietotājs iegrimst	Iespējams, nav pareizi komforta iestatījumi. Noregulējiet spiedienu (pacients guļ tieši uz matrača) un pagaidiet dažas minūtes. Pārbaudiet vēlreiz, izmantojot pārbaudes ar roku paņēmieni (skatīt 3.4. sadaļu). Pārbaudiet, vai CPR vārsts ir aizvērts.
Matracis nav stacionārs	Pārbaudiet, vai matracis ir piestiprināts pie apakšējā matrača ar elastīgām lencēm vai, ja matracim ir iebūvēts putu pildījums (CuroCell S.A.M.® PRO CF16), vai tas ir nostiprināts ar lencēm pie gultas pamatnes kustīgajām daļām.
Sūknis trokšņo, vai ir jūtama vibrācija	Pārbaudiet, vai sūknis ir pareizi piestiprināts pie gultas. Dažas gultas daļas var sākt rezonēt. Noņemiet sūkni un paklausieties, vai ir manāma atšķirība. To var novērst, novietojot sūkni uz līdzenas, stingras virsmas. Vai arī, novietojot, piemēram, divi starp sūkni un gultu.

Ja iepriekš sniegtā informācija nesniedza atbildes uz jūsu jautājumiem, lūdzam sazināties ar Care of Sweden vai vietējo izplatītāju, lai saņemtu turpmāko palīdzību.

8. Tehniskais apraksts

8.1. Tehniskās specifikācijas

SŪKNIS		RAKSTUROJUMS
Modelis		CuroCell S.A.M.® PRO
Spriegums		110-120 V, 60 Hz, 220-240 V, 50 Hz
Strāva		Maks. 10 W
Drošinātāja tips		T1AL, 250 V
Izmēri (GxPxA)		26x8x13 cm
Svars		1,5 kg
Skaņas līmenis		<28 dB
Apkārtējā vide	Temperatūra	Darbība: 5 °C - 40 °C
		Uzglabāšana: -25 °C - 70 °C
		Pārsūtīšana: -25 °C - 70 °C
	Mitruma	Darbība un transportēšana: 5 % - 95 %, bez kondensāta
		Uzglabāšana: 10 % - 80 %, bez kondensāta
	Atmosfēras spiediens	Darbība: 700 hPa līdz 1060 hPa
		Uzglabāšana un transportēšana 500 hPa līdz 1060 hPa
Klasifikācija		II klase, tips BF, IP21
MATRACIS		RAKSTUROJUMS
Modelis		CuroCell S.A.M.® PRO/CuroCell S.A.M.® PRO CF10/CuroCell S.A.M.® PRO CF16
Izmēri (GxPxA)		80/85/90/105/120x200/210x10/16 cm
Svars		2,6 kg (85x200 cm)/8,1 kg (85x200 cm)

NB! Ražotājs jebkurā laikā var mainīt izstrādājuma specifikācijas.

BRĪDINĀJUMS!

Rūpīgi ievērojiet ekspluatācijas un apkopes instrukcijas, lai nepieļautu traumas, kā arī bojājumus izstrādājumam vai citam aprīkojumam.

8.2. Marķējums

Matračī ir marķēti ar izstrādājuma nosaukumu, izgatavošanas datumu, izstrādājuma numuru, izmēru, kopšanas un mazgāšanas instrukcijām, EAN svītrkodu, kā arī vietu pašu marķējumam. Produkts arī parāda, kura puse novietojama uz augšu/uz leju un paredzēta galvai/kājām.

8.3. Simbolu taustiņš



Izstrādājuma numurs



Ražotājs

XXXX-XX-XX

Gads-mēnesis-diena



Pēdu izvietošana



Izlasiet lietotāja rokasgrāmatu



Funkcijas grupa



CE markējums atbilstoši Medicīnas ierīču direktīvai 93/42/EEK



Pārstrāde



Neizmest kopā ar sadzīves atkritumiem; ievērot otrreizējās pārstrādes instrukcijas



leteicamais lietotāja svars



Informācija par pacientu – kategorija



Novietojams tieši uz gultas pamatnes



Novietot virs esošā matrača



Var apgriezt



Var grozīt



Pretstatīts bīdes spēks



Papēžu funkcija (uz pārvalka norādīta kā "papēžu funkcija")



Nemazgāt veļas mašīnā



Mazgāt veļas mašīnā, 70 °C



Mazgāt veļas mašīnā, 95 °C



Hlors



Žāvēt veļas žāvētājā



Neizmantot veļas žāvētāju



Ļaut nožūt



Negludināt



Netīrīt ķīmiskajā tīrītāvā



Noslaucīt



II klases iekārta (dubulta izolācija)




Tips BF



IP kods (aizsardzības pret putekļiem un ūdens šļakatu iekļūšanas vērtējums)



Elektriskā sprieguma brīdinājums

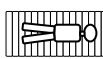

Matracis jāizmanto, lietotājam gulot gareniskā virzienā

9. Rezerves daļas

Steel pārvalks,
CuroCell S.A.M. PRO

Steel pārvalks,
CuroCell S.A.M. PRO CF10

Stone pārvalks,
CuroCell S.A.M. PRO CF10

Izmērs	Izstr. Nr.
80x200 cm	SC201-080200-SE0000
80x210 cm	SC201-080210-SE0000
80x220 cm	SC201-080220-SE0000
85x200 cm	SC201-085200-SE0000
85x210 cm	SC201-085210-SE0000
85x220 cm	SC201-085220-SE0000
90x200 cm	SC201-090200-SE0000
90x210 cm	SC201-090210-SE0000
90x220 cm	SC201-090220-SE0000
100x200 cm	SC201-100200-SE0000
100x210 cm	SC201-100210-SE0000
100x220 cm	SC201-100220-SE0000
105x200 cm	SC201-105200-SE0000
105x210 cm	SC201-105210-SE0000
105x220 cm	SC201-105220-SE0000
120x200 cm	SC201-120200-SE0000
120x210 cm	SC201-120210-SE0000
120x220 cm	SC201-120220-SE0000

Izstr. Nr.
SC220-080200-SE0000
SC220-080210-SE0000
SC220-080220-SE0000
SC220-085200-SE0000
SC220-085210-SE0000
SC220-085220-SE0000
SC220-090200-SE0000
SC220-090210-SE0000
SC220-090220-SE0000
SC220-100200-SE0000
SC220-100210-SE0000
SC220-100220-SE0000
SC220-105200-SE0000
SC220-105210-SE0000
SC220-105220-SE0000
SC220-120200-SE0000
SC220-120210-SE0000
SC220-120220-SE0000

Izstr. Nr.
SC221-080200-SE0000
SC221-080210-SE0000
SC221-080220-SE0000
SC221-085200-SE0000
SC221-085210-SE0000
SC221-085220-SE0000
SC221-090200-SE0000
SC221-090210-SE0000
SC221-090220-SE0000
SC221-100200-SE0000
SC221-100210-SE0000
SC221-100220-SE0000
SC221-105200-SE0000
SC221-105210-SE0000
SC221-105220-SE0000
SC221-120200-SE0000
SC221-120210-SE0000
SC221-120220-SE0000

Olivia, augšdaļa,
CuroCell S.A.M. PRO CF16

Stone, augšdaļa,
CuroCell S.A.M. PRO CF16

CuroCell, apakšdaļa,
CuroCell S.A.M. PRO CF16

Izmērs	Izstr. Nr.
80x200 cm	ST101-080200-SE0000
80x210 cm	ST101-080210-SE0000
80x220 cm	ST101-080220-SE0000
85x200 cm	ST101-085200-SE0000
85x210 cm	ST101-085210-SE0000
85x220 cm	ST101-085220-SE0000
90x200 cm	ST101-090200-SE0000
90x210 cm	ST101-090210-SE0000
90x220 cm	ST101-090220-SE0000
100x200 cm	ST101-100200-SE0000
100x210 cm	ST101-100210-SE0000
100x220 cm	ST101-100220-SE0000
105x200 cm	ST101-105200-SE0000
105x210 cm	ST101-105210-SE0000
105x220 cm	ST101-105220-SE0000
120x200 cm	ST101-120200-SE0000
120x210 cm	ST101-120210-SE0000
120x220 cm	ST101-120220-SE0000

Izstr. Nr.
ST102-080200-SE0000
ST102-080210-SE0000
ST102-080220-SE0000
ST102-085200-SE0000
ST102-085210-SE0000
ST102-085220-SE0000
ST102-090200-SE0000
ST102-090210-SE0000
ST102-090220-SE0000
ST102-100200-SE0000
ST102-100210-SE0000
ST102-100220-SE0000
ST102-105200-SE0000
ST102-105210-SE0000
ST102-105220-SE0000
ST102-120200-SE0000
ST102-120210-SE0000
ST102-120220-SE0000

Izstr. Nr.
SB101-080200-SE0000
SB101-080210-SE0000
SB101-080220-SE0000
SB101-085200-SE0000
SB101-085210-SE0000
SB101-085220-SE0000
SB101-090200-SE0000
SB101-090210-SE0000
SB101-090220-SE0000
SB101-100200-SE0000
SB101-100210-SE0000
SB101-100220-SE0000
SB101-105200-SE0000
SB101-105210-SE0000
SB101-105220-SE0000
SB101-120200-SE0000
SB101-120210-SE0000
SB101-120220-SE0000

Gaisa šūnas, ieskaitot caurules ar CPR un ātro savienotāju

Izstr. Nr.	Izmērs	Izstr. Nr.	Izmērs
CC-250900	80x200 cm	CC-250909	100x200 cm
CC-250901	80x210 cm	CC-250910	100x210 cm
CC-250902	80x220 cm	CC-250911	100x220 cm
CC-250903	85x200 cm	CC-250912	105x200 cm
CC-250904	85x210 cm	CC-250913	105x210 cm
CC-250905	85x220 cm	CC-250914	105x220 cm
CC-250906	90x200 cm	CC-250915	120x200 cm
CC-250907	90x210 cm	CC-250916	120x210 cm
CC-250908	90x220 cm	CC-250917	120x220 cm

Izstr. Nr.	Apraksts
SP103-EN0000	Matrača sūkņis, CuroCell S.A.M. PRO (110-120 V)
SP101-SE0000	Matrača sūkņis, CuroCell S.A.M. PRO (220-240 V)
CC-908060	Cauruļu komplekts, CuroCell S.A.M. PRO, 200 cm
CC-908061	Cauruļu komplekts, CuroCell S.A.M. PRO, 210 cm
CC-908062	Cauruļu komplekts, CuroCell S.A.M. PRO, 220 cm

Ja nepieciešamas citas rezerves daļas, lūdzam sazināties arCare of Sweden vai vietējo dīleri, lai saņemtu turpmāko palīdzību.

10. Opcijas un piederumi

10.1. Opcijas

Iekšējais pārsegs, mīksts

Uzlabo komfortu, var izmantot arī ļoti jutīgiem lietotājiem. Tas ir iekļauts CuroCell S.A.M.® CF10 un CuroCell S.A.M.® CF16 komplektācijā. Novietojiet gaisa šūnas pārvalka iekšienē ar mīksto putu pusi uz augšu.

Izturīgs transportēšanas maiss

Transportēšanas un uzglabāšanas maiss.

Matrača pārvalks

Ar metinātām šuvēm.

10.2. Piederumi

	Iekšējais pārvalks, CuroCell S.A.M. PRO CF10	Iekšējais pārvalks, CuroCell S.A.M. PRO CF16
Izmērs	Izstr. Nr.	Izstr. Nr.
80x200 cm	SI101-080200-SE0000	SI120-080200-SE0000
80x210 cm	SI101-080210-SE0000	SI120-080210-SE0000
80x220 cm	SI101-080220-SE0000	SI120-080220-SE0000
85x200 cm	SI101-085200-SE0000	SI120-085200-SE0000
85x210 cm	SI101-085210-SE0000	SI120-085210-SE0000
85x220 cm	SI101-085220-SE0000	SI120-085220-SE0000
90x200 cm	SI101-090200-SE0000	SI120-090200-SE0000
90x210 cm	SI101-090210-SE0000	SI120-090210-SE0000
90x220 cm	SI101-090220-SE0000	SI120-090220-SE0000
100x200 cm	SI101-100200-SE0000	SI120-100200-SE0000
100x210 cm	SI101-100210-SE0000	SI120-100210-SE0000
100x220 cm	SI101-100220-SE0000	SI120-100220-SE0000
105x200 cm	SI101-105200-SE0000	SI120-105200-SE0000
105x210 cm	SI101-105210-SE0000	SI120-105210-SE0000
105x220 cm	SI101-105220-SE0000	SI120-105220-SE0000
120x200 cm	SI101-120200-SE0000	SI120-120200-SE0000
120x210 cm	SI101-120210-SE0000	SI120-120210-SE0000
120x220 cm	SI101-120220-SE0000	SI120-120220-SE0000
Izstr. Nr.	Apraksts	
CC-9091	Transportēšanas un uzglabāšanas maiss, CuroCell S.A.M.® PRO	
CC-9093	Transportēšanas un uzglabāšanas maiss, CuroCell S.A.M.® PRO CF10	
58-900909	Transportēšanas un uzglabāšanas maiss, CuroCell S.A.M.® PRO CF16	

10.3. Citi piederumi

Lai nodrošinātu vislabāko komforta līmeni, ieteicams lietot papildierīces, ko piedāvā Care of Sweden, jo mūsu produkti ir paredzēti, lai labi strādātu mijiedarbībā. Ja ir nepieciešami piederumi vai vairāk informācijas par mūsu izstrādājumiem, lūdzam sazināties ar Care of Sweden vai apmeklēt mūsu tīmekļa vietni www.careofsweden.com.

11. Garantija

11.1. Joma

Šai CuroCell® sistēmai tiek nodrošināta 2 gadu garantija attiecībā uz ražošanas defektiem. Garantija neattiecas uz parastu nodilumu vai bojājumiem, kas radušies neuzmanības dēļ vai nepareizas lietošanas/kopšanas rezultātā.

11.2. Apkope un uzturēšana

Šis CuroCell® matracis ir Medicīnas ierīču direktīvas 93/42/EEK prasībām atbilstoša medicīniska ierīce, ko izmanto kā palīgīdzekli, lai nepieļautu izgulējumu čūlu veidošanos un ārstētu tās. Šī iemesla dēļ iesakām sūknim regulāri veikt apkopes un pārbaudes, lai uzturētu funkcionalitāti un veiktspēju. Tāpat kā citas tehniskas ierīces, pienācīgi apkopts sūknis strādā labāk un kalpo ilgāk.

Produkta darbmuža laikā dažas sūkņa daļas nodils, un, lai uzturētu labu funkcionalitāti un veiktspēju, tām būs nepieciešama apkope, kas jāveic sertificētam servisa speciālistam. Servisa un apkopes intervālu garums būs atkarīgs no tā, cik bieži un kādā mērā izstrādājums tiek lietots.

Apkopi un uzturēšanu vienmēr jāveic Care of Sweden vai kādam no tās pilnvarotiem tehniķiem. Izmantojiet tikai tās rezerves daļas, kuras ir apstiprinājuši Care of Sweden. Neapstiprinātu rezerves daļu izmantošana padara šo garantiju par nederīgu.

Defekti un trūkumi, kas ir uzskatāmi par garantijas defektiem, tiek novērsti bez maksas. Garantijas prasība jāiesniedz Care of Sweden pirms produkta atgriešanas.

11.3. Darbmūža ilgums

Matrača paredzamais darbmūžs ir 5 gadi.

12. Cita informācija

12.1. Demontāža un otrreizējā pārstrāde

Izņemot atsevišķas sūkņu daļas, enerģijas reģenerācija ir iespējama gandrīz visiem CuroCell® izstrādājumu materiāliem, tos sadedzinot atkritumu sadedzināšanas iekārtās.

Sūkņi: Lietotu CuroCell® sūkņi nedrīkst izjaukt. Tā vietā to vajadzētu nogādāt otrreizējās pārstrādes centrā. Izstrādājums ir jāšķiro kā elektronikas atkritumi.

Matracis: Lietots CuroCell® matracis ir jānogādā uz otrreizējās pārstrādes centru. Izstrādājums ir jāšķiro kā degoši atkritumi.

Lūdzu, sazinieties ar Care of Sweden vai vietējo izplatītāju, lai saņemtu plašāku informāciju.

12.2. Atgriešana un garantijas prasības

Iekams atgriezt izstrādājumu, vispirms sazinieties ar Care of Sweden. Atgriešanās sūtīšanas izdevumu apmaksās Care of Sweden, ja uz defektu ir attiecināma izstrādājuma garantija, pretējā gadījumā šos izdevumus sedz klients.

13. Jūsu piezīmes



Ražotājs

 care of sweden

SUPPORTING LIFE

Sazināties:

Tālrunis: +46 (0)771-106 600
Fakss: +46 (0)325-128 40
E-pasts: info@careofsweden.se
Interneta vietne: www.careofsweden.com

Pasta adrese:

Care of Sweden AB
Box 146
SE-514 23 Tranemo, Sweden

Apmeklējumu adrese:

Fabriksgatan 5A
SE-514 33 Tranemo, Sweden

Kravas adrese:

Byns väg 4A
SE-514 33 Tranemo, Sweden