

Lietošanas instrukcija

Swift Mobil Tilt

80209410



Ražotājs: etac®

UAB "Slaugivita"
Dubijos iela 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, fakss 841 595279
infolv@slaugivita.com, www.slaugivita.lv

Vispārīga informācija

Pateicamies, kad esat iegādājušies Etac dušas krēslu.

Lai izvairītos no savainojumiem krēsla lietošanas un apkopes laikā, lūdzu uzmanīgi izlasīt šo lietošanas pamācību. „Lietotājs“ ir persona, kura sēž krēslā, bet „Palīgs“ – persona, kura apkalpo krēslu.

Swift Mobil Tilt ir dušas un tualetes krēsls, piemērots personu ar kustību traucējumiem higiēnas procedūru atvieglošanai.


Swift Mobil Tilt tika pārbaudīts un konstatēts, kad ierīce atbilst EN ISO 10993 – 1 un SS EN 12182 normu prasībām.

Šis krēsls bija veidots lietošanai dušā, pie izlietnes vai uz tualetes poda, bet arī transportēšanai uz sanitārajām telpām.

Katra krēsla detaļa ir speciāli izveidota, lai tiku atvieglots palīga darbs un lietotājam sniegts komforts.




Δ Šis simbols lietošanas pamācībā informē, kad šajos punktos ir norādīti lietotājam un palīgam svarīgi drošības noteikumi.

Produkta apraksts Zīm. A

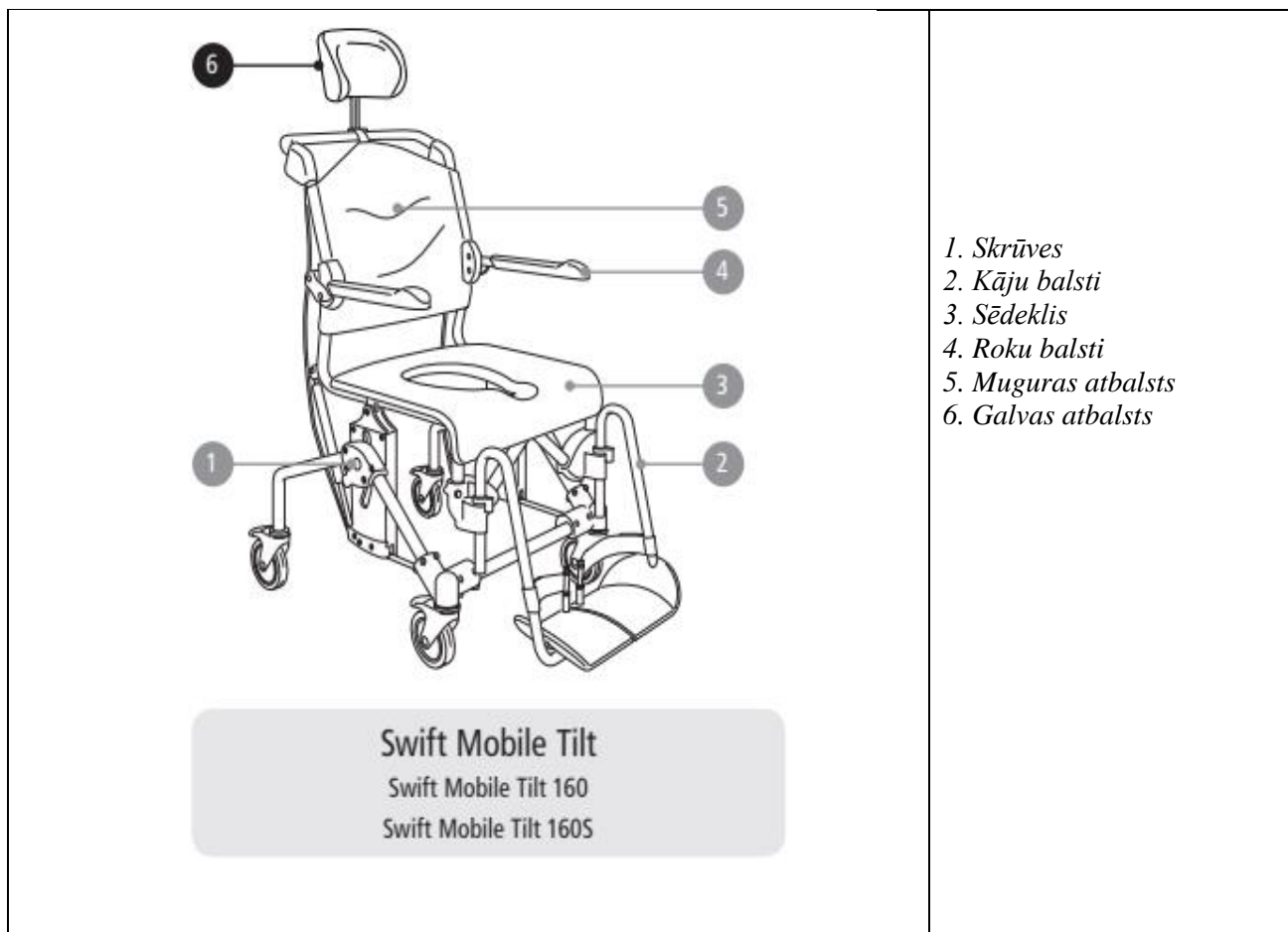

Montēšana – skatīt Zīm. B

B

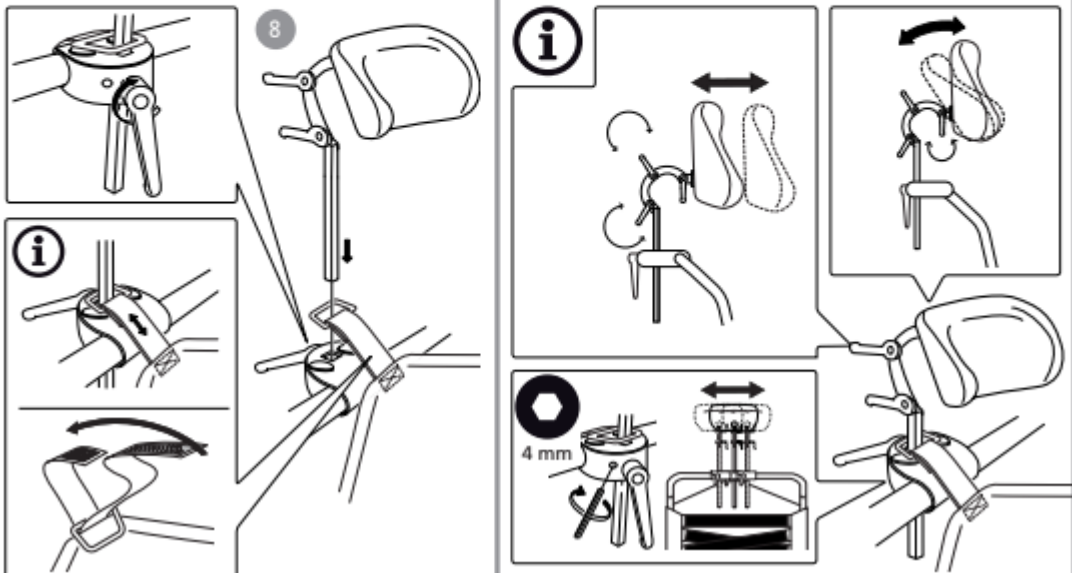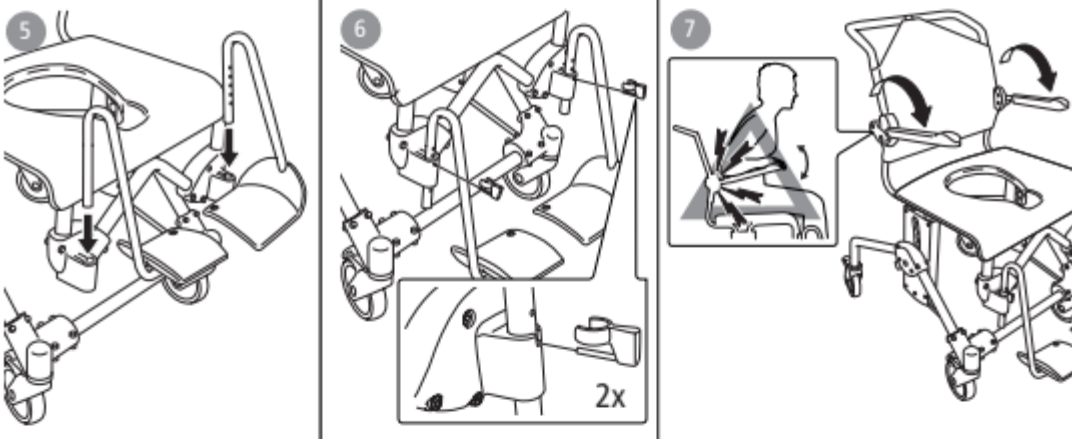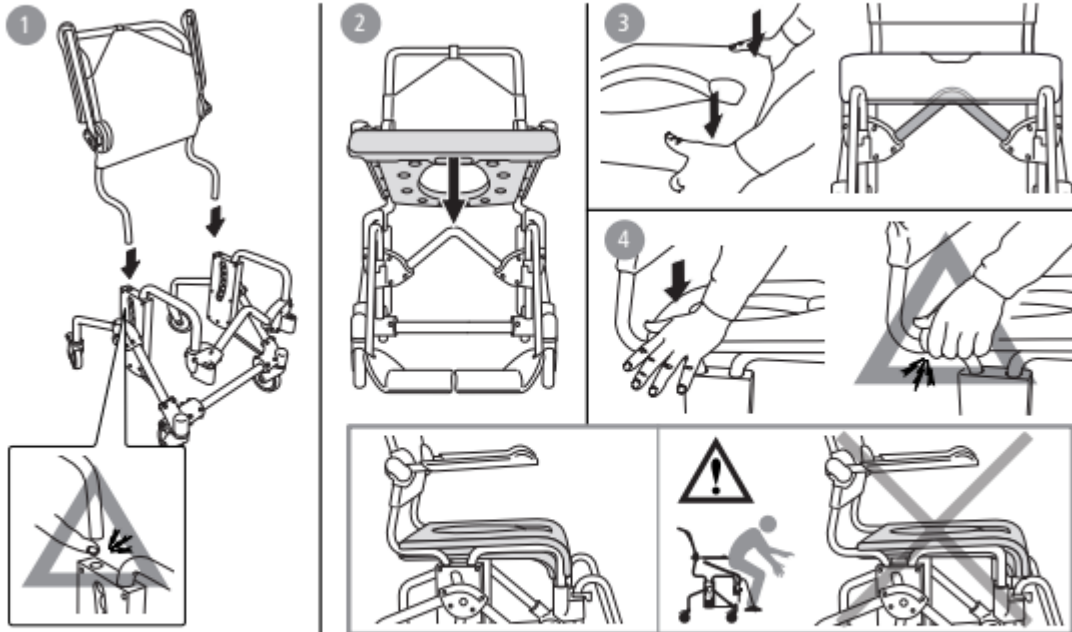

Izmēru tabula – skatīt Zīm. C

C							
Swift Mobile	94 cm	58 cm	45 / 60 cm	50 cm	49 cm	46,5cm	34 / 46,5 cm
S M 160	94 cm	63 cm	45 / 60 cm	50 cm	49 cm	46,5cm	34 / 46,5 cm
S M 160S	94 cm	58 cm	45 / 60 cm	50 cm	49 cm	46,5cm	34 / 46,5 cm
S M 24"	106 cm	74 cm	45 / 60 cm	50 cm	49 cm	46,5cm	34 / 46,5 cm
S M 24" 160	106 cm	74 cm	45 / 60 cm	50 cm	49 cm	46,5cm	34 / 46,5 cm
S M Tilt	104 cm	58 cm	50 / 65 cm	50 cm	52 cm	46,5cm	34 / 46,5 cm
S M Tilt 160	104 cm	63 cm	50 / 65 cm	50 cm	52 cm	46,5cm	34 / 46,5 cm
S M Tilt 160S	104 cm	58 cm	50 / 65 cm	50 cm	52 cm	46,5cm	34 / 46,5 cm

Swift Mobile	22 cm	48 cm	26 cm	50 cm	135 kg	297 lbs	16,6 kg
S M 160	22 cm	54 cm	26 cm	50 cm	160 kg	352 lbs	17,3 kg
S M 160S	22 cm	48 cm	26 cm	50 cm	160 kg	352 lbs	17,2 kg
S M 24"	22 cm	48 cm	26 cm	50 cm	135 kg	297 lbs	24,4 kg
S M 24" 160	22 cm	54 cm	26 cm	50 cm	160 kg	352 lbs	25,1 kg
S M Tilt	22 cm	48 cm	33 cm	54 cm	135 kg	297 lbs	19,7 kg
S M Tilt 160	22 cm	54 cm	33 cm	54 cm	160 kg	352 lbs	20,4 kg
S M Tilt 160S	22 cm	48 cm	33 cm	54 cm	160 kg	352 lbs	20,3 kg

Garantija, apkope – skatīt Zīm. D

D

1



2



5 gadu garantija materiālu un ražošanas defektiem. Par noteikumiem un nosacījumiem skatiet www.etac.com.

Kalpošanas laiks 7 gadi. Plašāku informāciju par izstrādājuma kalpošanas laiku skatiet vietnē www.etac.com

Apkope un atjaunošana:

Lai uzturētu krēslu labā un drošā darba kārtībā, regulāri jārīkojas šādi:


D1 Notīriet krēslu ar neabrazīvu mazgāšanas

līdzekli. Noskalot un nosusināt.

D2 Produktu var tīrīt 85 ° C temperatūrā 3 minūtes.

- Riteņus regulāri atbrīvojiet no matu, ziepju nogulsniem utt. Ja jūsu dušas un tualetes krēsls nav piemērotā darba kārtībā, sazinieties ar izplatītāju.


Drošība – skatīt Zīm. E

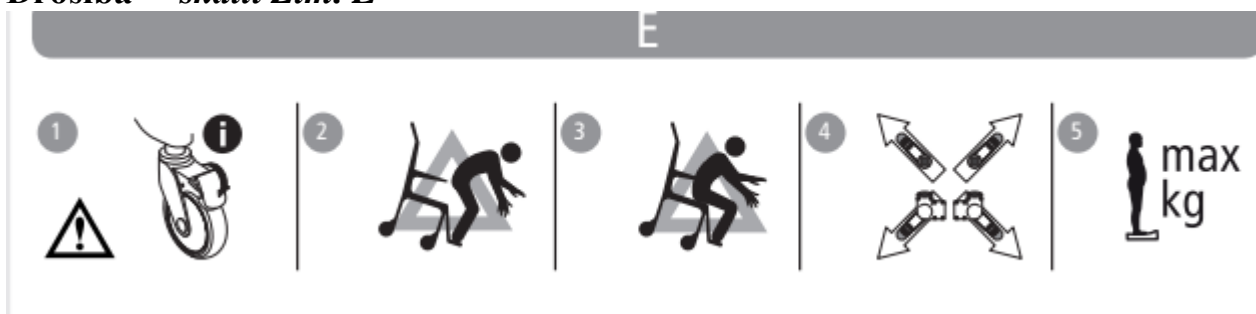

Δ Ja krēsls ir bojāts, to nedrīkst lietot.

- E1.** Apsēdinot vai pieceļot lietotāju un lietojot saliekšanas funkciju, jānofiksē ritenīši.
Ja lietotājam ir amputētas ekstremitātes, jālieto pretapgāšanās ritenīši.
E2. Nekad nedrīkst stāvēt uz kāju balstiem, krēsls var apgāzties!
E3. Sēdēšanas pozīcijai ir ietekme uz stabilitāti.
E4. Krēsla stabilitāti var uzlabot, ja riteņi ir noregulēti taisni uz priekšu.
E5. Nekad nepārsniedziet krēsla maksimālo slodzi.

Transportēšana – skatīt Zīm. F

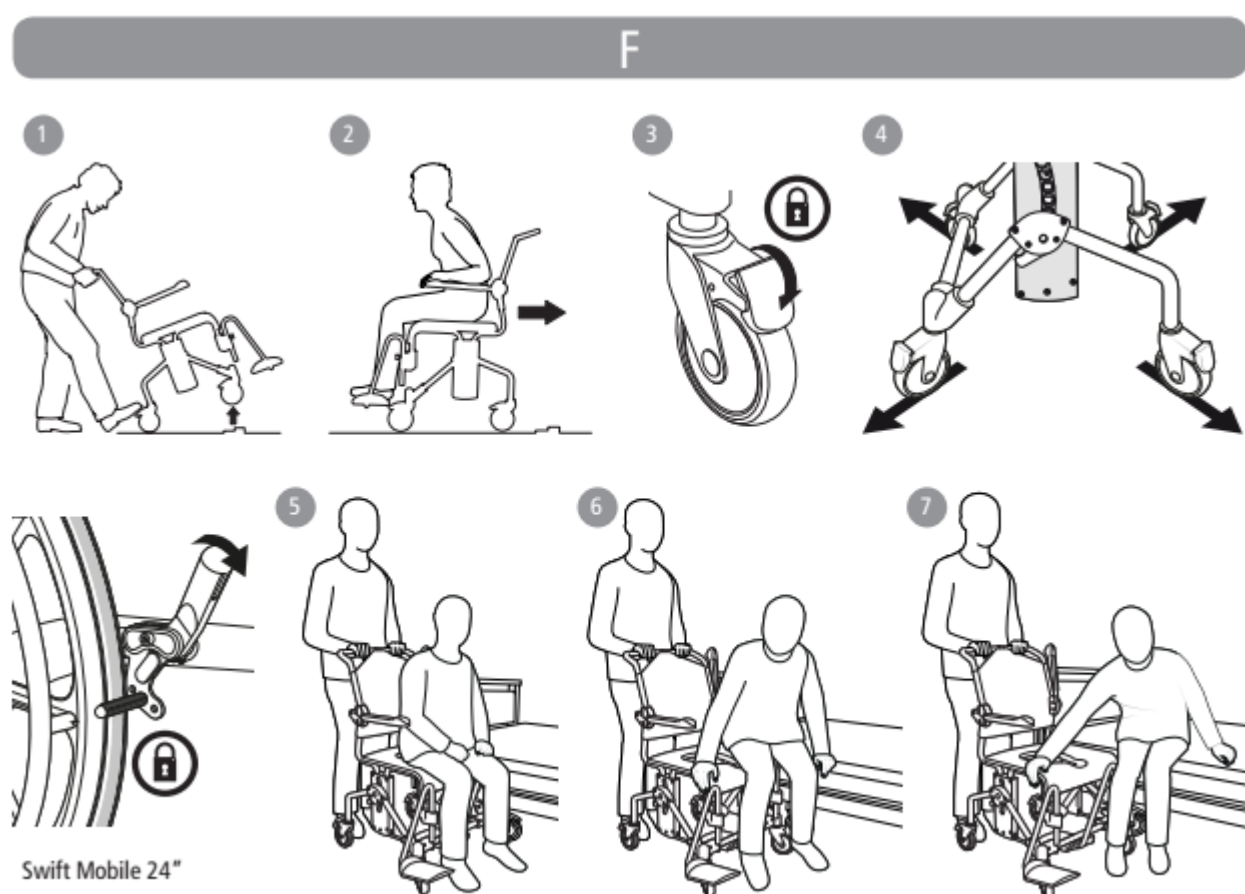

Swift Mobile 24"

Pār sliksnim:

F1. Tukšā krēslā, novietojiet vienu kāju uz šasijas caurulītes

F2. Ar pasažieri velciet krēslu atpakaļ.

Stacionārā pozīcijā:

F3. Vienmēr pieslēdziet tik daudz riteniņu, cik vien iespējams, kad krēslu paredzēts izmantot nekustīgā pozīcijā.

F4. Uz āru izbīdīti riteņi uzlabo krēsla stabilitāti.

Transportēšana:

Novērtējiet riskus un veiciet piezīmes. Jūs kā aprūpētājs ir atbildīgs par lietotāja drošību. Jālieto speciāli palīglīdzekļi, ja transportēšana tiek uzskatīta par riskantu.


F3-F4. Pirms veikt pārvietošanu uz un no Swift Mobile ir svarīgi nodrošināt, lai riteņi būtu bloķēti un vērsti uz āru.

• Paceliet roku balstus, lai veiktu pārvietošanu.

F5-F7. Veiciet pārvietošanu.

1. Apsēdinot un pieceļot lietotāju, nepieciešams nofiksēt vismaz divus ritenišus.
2. Apsēdinot un pieceļot lietotāju, kāju balsti jānovirza uz sāniem.

Transportēšana – skatīt Zīm. G

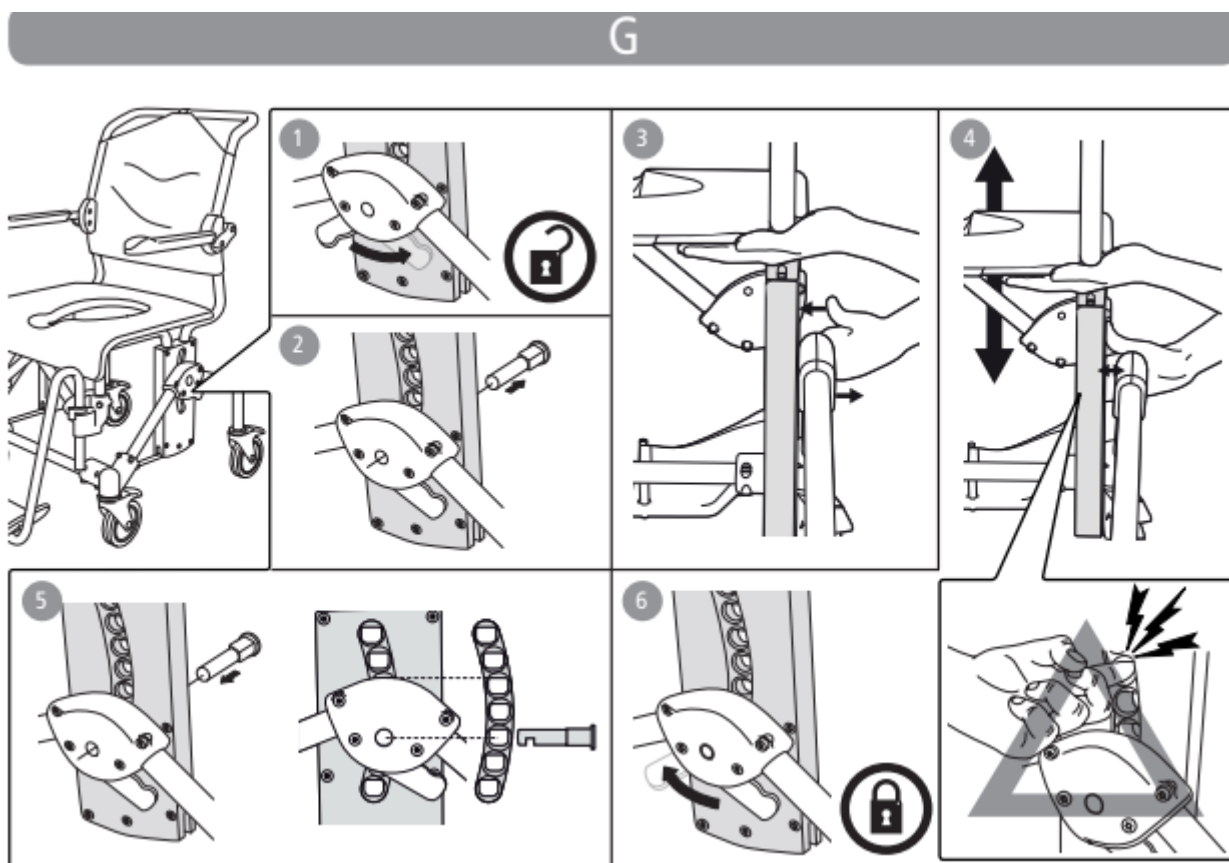







Augstums

G1-G7. Augstums ir viegli noregulējams, ievietojot skrūvi vajadzīgajā pozīcijā. Skatiet attālumus tabulā.

!!! Pārbaudiet, vai abas puses ir noregulētas vienādā augstumā, jo citādi krēsls var zaudēt stabilitāti!. G8 Nelietojiet krēslu, ja skrūve (oranža) nav bloķēta.

G

7		
Swift Mobile	45 / 60 cm	
Swift Mobile 160	45 / 60 cm	
Swift Mobile 160S	45 / 60 cm	
Swift Mobile 24"	45 / 60 cm	
Swift Mobile 24" 160	45 / 60 cm	
Swift Mobile Tilt	50 / 65 cm	
Swift Mobile Tilt 160	50 / 65 cm	
Swift Mobile Tilt 160S	50 / 65 cm	

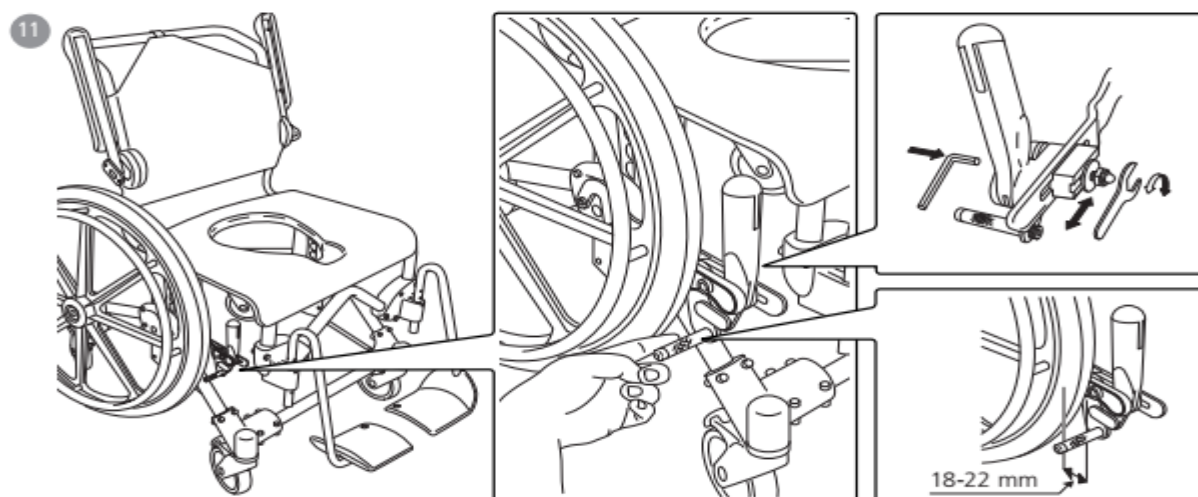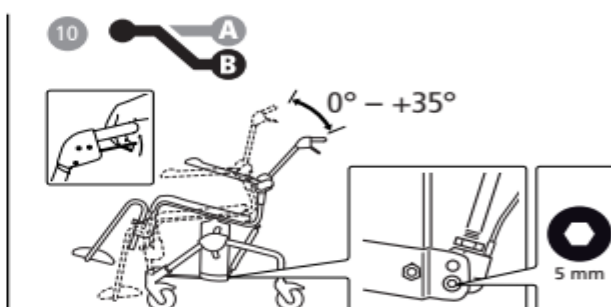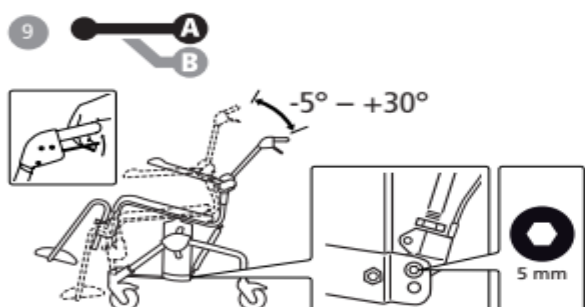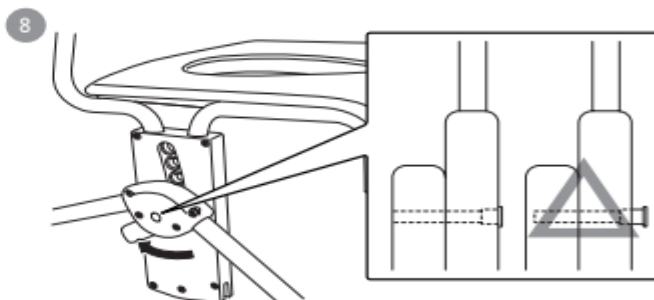

Slīpuma leņķis

G9. Pielāgojiet gāzes virzuli A pozīcijā, lai slīpētu sēdekli pie leņķiem no -5 ° līdz 30 °


G10. Ievietojiet gāzes virzuli stāvoklī B, lai sēdekļa slīpi novietotu no 0 ° līdz 35 °

Lietotāja bremze

G11. Pielāgojot bremzi, bremžu kontakts jānovieto no 18 līdz 22 mm no aizmugurējā riteņa, lai tas būtu ērti satverams.

Kāju balsti – skatīt Zīm. H

H

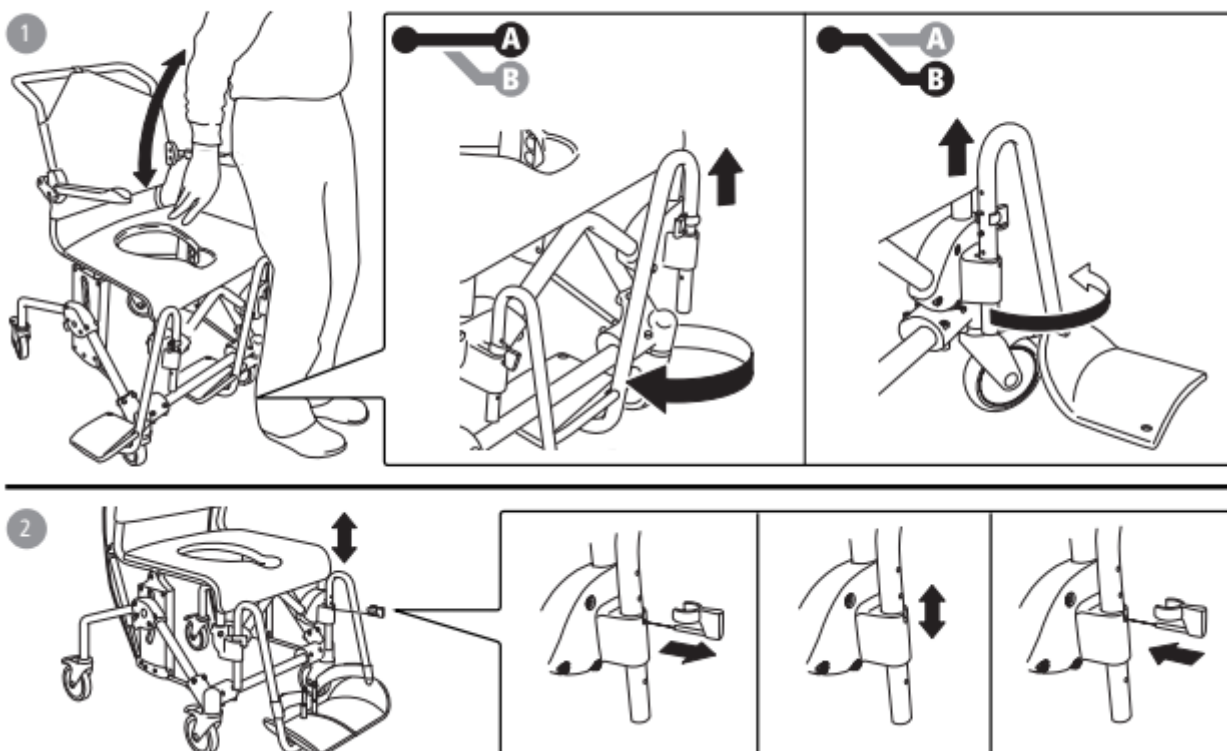


H1. palīgs var pacelt kāju balstus un novirzīt tos uz sāniem, ja lietotāju vajag apsēdināt uz krēsla vai piecelt no tā (Kāju balstus var noņemt).

H2. Pārceļot fiksācijas tapas var noregulēt nepieciešamā augstumā (zīm. E 2). Kāju balstus var noregulēt 6 dažādās pozīcijās.

Noliekšanas funkcija – skatīt Zīm. I

I

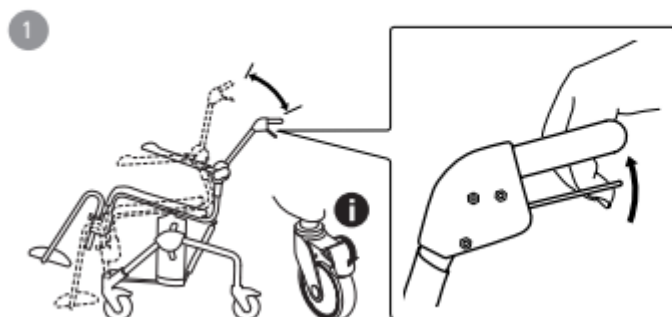

I1. Palīgs var viegli pielāgot sēdēšanas leņķi, noturot rokturi un noliekot vajadzīgo pozīciju.
!!! Pārliecinieties, ka riteņi ir bloķēti, ja slīpuma funkciju izmanto, kad lietotājs sēž krēslā.

Pārdevējs: UAB "Slaugivita"

GARANTIJAS TALONS

Iekārtas nosaukums_Dušas /tualetes ratini_____

Modelis__SwiftMobilTilt_____

Sērijas Nr._____

Pārdošanas datums_____PVN fakturrēķina Nr._____

Pārdevēja uzvārds_____Paraksts_____

Z.V.

Šim pārdotam izstrādājumam noteikta 5 gadi garantija no pārdošanas datuma. Garantijas periodā bezmaksas tiks novērsti bojājumi, kas saistīti ar izstrādājuma materiālu kvalitāti vai ražošanas defektiem.

Garantija netiek piemērota:

Nepareizas apkopes gadījumā: par iegādātā ražojuma (iekārtas) ikdienas apkopi atbilda īpašnieks vai tā pilnvarota persona. Gadījumā, ja bojājums radās nepareizas apkopes rezultātā, pārdevējam ir tiesības nepiemērot garantiju.

Pārslodzes un nepareizas lietošanas gadījumā: t.i., ka ražojums (iekārta) lietojama pārkāpjot ekspluatācijas noteikumus, lietojot ne pēc uzdevuma vai tīšprātīgas bojāšanas rezultātā.

Modifikācijas gadījumā: Ja tika mēģināts demontēt, remontēt, modificēt ražojumu (iekārta) bez pārdevēja servisa piekrišanas vai tika pielietots nepareizs vai nekvalitatīvs aprīkojums.

Citos gadījumos: ja ražojums (iekārta) tika sabojāta ugunsgrēka, appliešanas ar ūdeni (plūdu), zemestrīces u.c. stihisko nelaimju gadījumos.

Garantija tiek piemērota tikai iekārtas bojājumam. UAB "Slaugivita" nav atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti citam īpašumam vai personām. Garantijas gadījumā jāiesniedz šis garantijas talons un pirkšanas dokumenta kopija.

Ar garantijas noteikumiem iepazīnos un piekrītu:

Pircēja paraksts_____

Garantijas apkalpošana tel.: 8 41 540204; 8 611 48081; 8 620 11394

1. Bojājums _____

Datums: _____

Pielietotas daļas: _____

Serviss _____

(Amats, vārds; uzvārds; paraksts)