

Veļas rati – ISEO Līnija

Mod. CB / CBP & CBW / CBWP

Lietošanas instrukcija

Saturs:

- 1.0 Izmantošanas mērķis
- 2.0 Drošības informācija
- 3.0 Tehniskās specifikācijas
- 4.0 Pirms lietošanas
- 5.0 Ratiņu izmantošana
- 6.0 Apkope un tīrīšana
- 7.0 Utilizēšana
- 8.0 Garantija



FRANCEHOPITAL SAS
Eksporta birojs
Via Bolzano, 2
I-39011 LANA - BOLZANO
Tālrunis: +39 0473 552611
Fakss: +39 0473 552699
E-pasts:
export@francehospital.com

1.0 IZMANTOŠANAS MĒRĶIS

Veļas ratiņi Mod. CB - CBP - CBW un CBWP ir paredzēti izmantošanai slimnīcās, klīnikās, pansionātos, aprūpes un atpūtas namos, kā arī operāciju zālēs.

Paredzēti jebkura materiāla maisu piestiprināšanai (audums, plastmasa, papīrs, ...) netīrās veļas šķīrošanai slimnīcas vidē.

Ir bīstami:

- transportēt personas
 - kravas, kas pārsniedz ratiņu jaudu
- Ratiņi konstruēti, lai būtu funkcionāli, vienkārši lietojami, ergonomiski un droši.

2.0 DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

- Personu pārvadāšana ir aizliegta
- Izmantojiet bremzes, kad ratiņi netiek lietoti.
- Maisos neliet tīrīšanas šķidrumus

3.0 TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

- Rāmis no nerūsējošā tērauda AISI 304 Ø 20 mm
- Pastiprināta polipropilēna maisa atbalsts
- Polipropilēna vāki
- Tukšu ratu kopējais svars: 4,6 kg
- Maksimālā svara ietilpība: 100 kg
- Riteņi Ø 80/100 mm, 2 ar bremzēm

4.0 PIRMS LIETOŠANAS

Nav nepieciešamas īpašas instalācijas. Ratiņi ir gatavi lietošanai.

5.0. RATIŅU IZMANTOŠANA

Nekad nevelciet, bet vienmēr stumiet ratiņus. Velkot ratus no mugurpuses, pastāv nopietni papēžu savainošanas draudi.

Aktivizējiet bremzes lietošanas laikā.

Lai pārvietotu ratiņus vienmēr izmantojiet rokturus (ja tādi ir), nekad nestumiet ratus aiz vāka vai nilona kabeļa.

6.0 APKOPE UN TĪRĪŠANA

Cita uzturēšana nav nepieciešama, izņemot regulāru tīrīšanu.

Nerūsējošā tērauda virsmas var viegli tīrīt un uzturēt paaugstinātā higiēnas līmenī.

Lai notīrītu pirkstu nospiedumus, pietiek ar mīkstu drānu, a ziepēm un ūdeni samitrinātu sūkli vai mikrošķiedras salveti.

Lai noņemtu konsekvētākus netīrumus, piemēram, sīrupa vai tējas traipus, var izmantot vienkāršu krēmu.

Nelietojiet abrazīvus izstrādājumus, kas var atstāt skrāpējumus.

Nelietojiet stieplu sūkļus, piemēram, metāla švammes.

Izvairieties no balinātājus saturošu dezinfekcijas līdzekļu lietošanas (nātrija hipohlorīts, šķīdumi, kas balstīti uz hlora skābi, vai šķīdumiem, kas satur halogēnus). Tie var sabojāt tēraudu, ja tas ir koncentrēts vai palicis saskarē ar virsmu ilgāku laiku

7.0 UTILIZĒŠANA

Dzīves cikla beigās visas ratiņu daļas var pilnībā pārstrādāt.

8.0 GARANTIJA

Ratiņu garantija ir spēkā 24 mēnešus no iegādes.



3 vienkārši soļi, kā ievietot veļas maisu:

1 – aplikt maisu ap gredzēniem (gan plastmasas, gan nerūsējoša tērauda) virzienā no iekšpuses uz ārpusi

2- pacelt nerūsējošā tērauda gredzenu

3 – ar abām rokām nolaist nerūsējošā tērauda gredzenu un ielikt maisa pārklājušos daļu plastikāta gredzenā