


# Lietošanas norādījumi, apraksts un garantija

## MATRAČI HEALTH GUMOTEX

Hospital MONO 12



Hospital basic 14

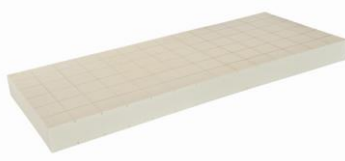

Hospital optimal 14



Hospital PLUS 14



Hospital Lux 14



- Matraču bāze ir izgatavota no dažādu materiālu apvienojuma, kas nodrošina ērtu gulēšanu. Noņemamais apvalks ir izgatavots no augstas kvalitātes auduma, oderēta poliētera (PES) „fleece“ auduma vai pat ar porolonu.
- Porolona materiāli atbilst prasībām saskaņā ar Ōko-Tex standartu, I klasi – ir piemēroti bērniem līdz 3 gadu vecumam.
- Matracim piemīt specifiska smaržas, kura pēc kāda laika izzūd.
- Matrača materiāls ir degošs.
- Matracis ir izveidots no atsevišķām daļām.
- Nelielas uguns nodzēšanai izmantot putu vai pulvera ugunsdzēsamos aparātus.
- Izmešanai paredzētos matračus var nogādāt uz pašvaldībai piederošajām atkritumu izgāšanas vietām, atsevišķas matrača daļas var tikt pārstrādātas.
- Matrača iepakojums ir izgatavots no PELD materiāla (maza biezuma polietilēna), var pārstrādāt.

### Kopšanas norādījumi

Lai matracis kalpotu savam paredzētajam mērķim, tas ir, veselīga miega un relaksācijas nodrošināšanai, ievērojiet zemāk aprakstītos lietošanas principus:

- Matraci uz likt uz gultas rāmja, kuram ir vismaz 24 listiņu zonas (lielākais attālums starp zonām 40 mm) vai uz izturīgas pamatnes ar vairāk kā 40 mm platiem caurumiem uz visas virsmas. Visideālāk matraci ir lietot uz GUMOTEX piedāvātā gultas rāmja ar listītēm. Izmantojot rekomendēto bāzi ar gultas rāmi ar listītēm un regulāri apvēršot matraci, pagarināsiet matrača kalpošanas laiku un samazināsiet tā iespējamo deformāciju, kura nedrīkst pārsniegt 10 % no visa matrača lieluma.
- Matraci var izmantot no +5 °C līdz +50 °C temperatūras robežās.
- Sargāt matraci no tiešiem saules stariem un mitruma, šādi tiks pasargāts arī pārvalka tonis un pagarināts matrača kalpošanas laiks.
- Matrača pārvalks ir noņemams un to var mazgāt vai tīrīt sausā veidā (skatīt pārvalka kopšanas simbolus).
- Noņemot pārvalku un vēlreiz to uzvelkot nesabojāt tā rāvējslēdzi.
- Nav ieteicams noņemt atdalītāja pārvalku!
- Vēdināt matraci vismaz 6 reizes gadā.

Matracis ir klīniski pārbaudīts veselības uzraudzības piegādātāja - **Fakultni nemocnice (Universitātes slimnīcā) Olomouc** un saskaņā ar galējo medicīnas līdzekļu klīnisko izvērtējuma atskaiti un personu atskaitēm, kas veikušas pārbaudi:

- matracis nodrošina pacientiem lielāko komfortu. To var izmantot tikai guļošiem pacientiem pat aprūpes namu apstākļos, nodrošina minimālo izgulējumu risku. Pacientiem ar urīna nesaturēšanas problēmām iesakām izmantot matraci ar Bravo pārvalku, kuru var mazgāt 90 °C temperatūrā.

### Garantijas sertifikāts

GUMOTEX, a. s. standarta 2 gadu garantijas laika posms Jums ir pagarināts līdz 5 gadiem.

Ja ievērosiet atbilstošus lietošanas un kopšanas principus saskaņā ar norādījumiem, ražotājs nodrošinās kvalitātes garantiju līdz pat 60 mēnešiem no pārdošanas datuma. Garantijā nav iekļauta parastā matrača nolietojums. Materiāli vai ražošanas brāķu gadījumā iesniedziet pretenziju veikalā, kurā iegādājāties matraci. Ja vēlaties, lai tiktu atgriezta nauda, iesniedziet garantijas sertifikātu un maksājuma pierādījumu. Bez apstiprinošiem pirkšanas dokumentiem pretenzijas par matraci netiks pieņemtas.

**Atgriešanai paredzētajam matracim ir jābūt adekvāti iztīrītam, jābūt likvidētiem visiem putekļiem un tam ir jābūt higiēniskam saskaņā ar vispārīgajām higiēnas normām. Matracim ir jābūt atbilstoši iepakotam, lai tas nesabojātos un nebūtu nosmērēts ar putekļiem.**

Ražotājs: GUMOTEX, a. s., Mládežnická 3A, č. p. 3062; 690 75 Břeclav; Čehijas Republika

Pārdošanas datums:

Veikala zīmogs un paraksts

LAT