

ReadySlide Small



Lietošanas mērķis: Lai paceltu uz augšu gultā, pārceltu no gultas uz riteņkrēslu/klozetu, grozīšanai gultā.


Nobloķējiet riteņkrēsla bremzes pirms veiciet pārcelšanu, citādi slīdošo paklāju zem pacienta nedrīkst likt.

Esiet piesardzīgs, ja sēdīniet pacientu uz paklāja, tam atrodoties uz gultas malas!

Funkciju pārbaude: funkcionalitāti nepieciešmas pārbaudīt pirms izmantošanas un vēlāk to darīt regulāri, īpaši pēc mazgāšanas. Pārbaudiet, vai šuves un rokturi nav bojāti. Pavelciet aiz katra roktura un paskatieties vai tie notur lielu slodzi. Ja novērsotie nolietojšanās pazīmes, līdzekli neizmantojiet.

Īsa informācija

Preces nr.	Izstrādājums	Izmērs
11250	ReadySlide	70x70 cm

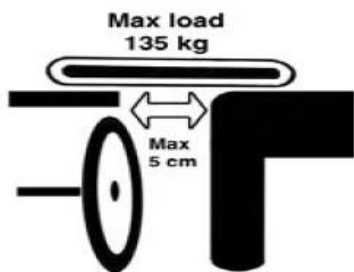

e-mail: info@slaugivita.com, www.slaugivita.com, nemokama linija 8 800 00225

