

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



Izgulējumu novēršanas sistēma
Mainīga gaisa spiediena sistēma
PROTECTOR I

Ražotājs: **HERDEGEN**



UAB "Slaugivita"

Dubijos 16, LT-77172 Šauļi, Lietuva, tel. 841 522439, faks. 841 595279

infolv@slaugivita.com, www.slaugivita.lv

Izgulējumu novēršanas sistēma

Mainīga gaisa spiediena sistēma

PROTECTOR I

Pirms izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo instrukciju un saglabāiet to.

Šī mainīga spiediena sistēma ir paredzēta izgulējumu novēršanai cilvēkiem ar invaliditāti. Mainīgā spiediena pumpis pastāvīgi iepūš gaisu „A” un „B” gaisa šūnās. Šādā veidā tiek samazināts spiediens uz pacientu un stimulē asins maiņu un šādā veidā tiek novērsta izgulējumu rašanās.

PIESARDZĪBAS LĪDZEKĻI:

- ✓ Neturiet šo produktu laukā un tiešos saules ataros (neatstājiet matraci automašīnā augstā temperatūrā !!!). Uzglabāiet matraci iztaisnotu vai sarullētu sausā telpā, lai izvairītos no deformācijas.
- ✓ Neturēt augstā temperatūrā (virs 38 ° C vai 100 ° F vai zemāk 0 ° C, vai 32 ° F). Izmantojiet tikai telpās.
- ✓ Sargājiet no asiem, smailiem priekšmetiem.
- ✓ Izmantojiet tikai iztaisnotu matraci.
- ✓ Pirms lietošanas pārlicinieties vai matracim nav trūkumu, vai kompresors nav bojāts.
- ✓ Pirms lietošanas pārlicinieties, ka matrača atloki ir atbilstoši un droši novietoti zem matrača.
- ✓ Vienmēr pievērsiet uzmanību pacienta svaram un norādītajai svara robežai uz ierīces etiķetes.
- ✓ Izmantojiet šo matrača sistēmu gultās ar sānu aizsarg margām.
- ✓ Izmantojiet matrača sistēmu pēc ārsta norādījumiem.
- ✓ Ja pacienta āda sāk kļūt sarkana, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un vērsieties pie ārsta.
- ✓ Kompresoram ir jābūt tieši pieslēgtam pie elektrības ligzdas, neizmantojiet citus pagarināšanas barošanas vadus.
- ✓ Ja rodas šaubas par to, ka matracis vai kompresors ir sabojāti, nekavējoties atvienojiet to no kompresora.
- ✓ Ja vēlaties mainīt matrača stāvokli, atvienojiet kompresoru no elektrības ligzdas.
- ✓ Regulāri pārlicinieties, vai nav sabojāts barošanas vads.
- ✓ Ja vēlaties samazināt elektrības elektrošoka risku: Vienmēr atvienojiet ierīci uzreiz pēc lietošanas.
- ✓ Sargājiet visas elektroierīces no ūdens.
- ✓ Šo produktu nekad nedrīkst atstāt bez uzraudzības, kad tas ir ieslēgts elektrības ligzdā.
- ✓ Uzmaniet barošanas vadu no karstām virsmām.
- ✓ Nelieciet uz matrača smagas lietas vai porolonu.
- ✓ Neskrāpējiet gaisa matraci ar asiem priekšmetiem.
- ✓ Nesmēķējiet guļot vai sēžot uz matraci.
- ✓ Gaisa matrača un kompresora tīrīšanai izmantojiet tikai maigus tīrīšanas līdzekļus, kas nesatur alkoholu.

- ✓ Neizjauciet kompresoru.
- ✓ Vērojiet, lai vienā matrača vietā nebūtu pārāk liels spiediens.
- ✓ Nekad netīriet ķīmiski un neizmantojiet žāvētāju.
- ✓ Nenovietojiet blakus matracim nekādas sildīšanas ierīces.

Kaut arī izmantojot šo matrača sistēmu, ir vajadzīga pacienta ķermeņa pozicionēšana.

No izgulējumiem var izvairīties, mainot pacienta guļus vai sēdus stāvokli, kā arī samazinot spiediena risku kaulu apvidos. Citi līdzekļi, kas palīdz izvairīties no izgulējumiem: ādas apkope, regulāra ādas apkope, labs uzturs. Mainīga spiediena matrača izmantošana palīdz mazināt spiedienu.

GAISA MATRAČA LIETOŠANA:

1. Vienmēr izmantojiet palagu starp pacientu un matraci.
2. Uzlieciet kompresoru uz horizontālas virsmas vai piekariniet to, izmantojot āķīšus.
3. Uzlieciet matraci uz standarta matrača vai porolona.
4. Nolieciet abus matrača galos esošos atlokus zem standarta matrača vai porolona. Gaisa caurulei jābūt gultas galā.
5. Pārbaudiet katru gaisa šūnu un pārliedzinieties, ka katra gaisa šūna ir horizontālā stāvoklī un nav uzlikta viena uz otras.
6. Cieši iebāziet gaisa cauruli pumpju gaisa izlaišanas atverē un pārliedzinieties, ka tas turas cieši. Pārliedzinieties, ka gaiss var brīvi iekļūt gaisa caurulē.
7. Ieslēdziet kompresoru barošanas avotā un ieslēdziet enerģijas piegādes podziņu. Ieslēgsies podziņas lampiņa, kas rāda, ka pumpis ir ieslēgts.
8. No sākuma komforta līmeņa disku pagrieziet uz zīmes "Max". Pagaidiet 20 minūtes, kamēr matracis būs piepūsts.
!!! Matrača sagatavošanas laikā uz tā nedrīkst sēdēt vai gulēt !!!
9. Izvēlāties komforta līmeni, griežot komforta iestatīšanas podziņu.

BRĪDINĀJUMS!!!

Neatbilstoši lietojot šo sistēmu, var savainot lietotāju un sabojāt izstrādājumu.

- Gaisa matraču sistēmu ST100/ST150 iznīcināt vajadzētu vadoties pēc valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem.

TEHNISKĀS PROBLĒMAS

Ja rodas tehniskas problēmas, nekavējoties sazinieties ar izplatītāju. Ir dažās situācijās, kad varat atrisināt problēmu bez izplatītāja palīdzības.

IESPĒJAMĀS SITUĀCIJAS:

(1) Situācija:

Kompresors darbojas, bet matracis nepiepūšas. Vai dažās šūnās nav pietiekams spiediens.

- Procedūra: pārliecinieties par pareizu spriegumu.
Iespējamais risinājums: izmantojiet jaudas regulatoru.
Procedūra: pārbaudiet gaisa cauruli un gaisa straumi.
Iespējamais risinājums: paregulējiet gaisa cauruli, lai gaiss brīvi cirkulētu.
- Procedūra: pārliecinieties, vai gaisa caurulei nelaiž gaisu.
Iespējamais risinājums: vērsieties pie izplatītāja, lai nomainītu cauruli.
 - Procedūra: pārliecinieties, vai gaisa caurule ir cieši piestiprināta.
Iespējamais risinājums: cieši piestipriniet gaisa cauruli.
- Procedūra: pārbaudiet, vai kāda gaisa šūna nelaiž gaisu.
Iespējamais risinājums: vērsieties pie izplatītāja, lai nomainītu bojāto gaisa šūnu.

(2) Situācija:

Kompresors nedarbojas.

- Procedūra: pārbaudiet vai elektrības ligzdas spiediens ir pareizs.
Iespējamais risinājums: izmantojiet jaudas regulatoru.
- Procedūra: pārbaudiet vai drošinātājs ir labs.

Iespējamais risinājums: vērsieties pie izplatītāja, lai nomainītu drošinātāju.

Šim produktam ir CE sertifikāts

Kompresors:

Barošana: 220V / 50Hz. Gaisa izeja: ≥ 4.5 l / min.

Spiediena diapazons: 40 mm Hg - 100 mmHg

Cikla laiks: no 10 līdz 12 min. Jaudas patēriņš: 7W. Drošinātājs: 1A

Izmērs: 24.6cm (L) x 11.8cm (platums) x 9.5cm (H). Svars: 1.4 kg

Matracis:

130 piepūšamas gaisa šūnas.

Izmērs: 280cm (L) x 90cm (platums) x 6.5cm (H).

Ar atlokiem.

Materiāls: PVC (LT-71, maz toksisks). Krāsa: smilšu.

Ieteicamā matrača slodze: 110 kg

Pieļaujamā mehāniskā slodze: 130 kg.

Iekārtas nosaukums: Burbuļu matracis izgulējumu profilaksei Protector I, komplekts

Modelis: 410220

Pārdošanas datums:

PVN fakturrēķina LAT Nr.:

Pārdevēja uzvārds _____ Paraksts _____

Z.V.

Šim pārdotam izstrādājumam noteikta **12** mēn. garantija no pārdošanas datuma. Garantijas periodā bezmaksas tiks novērsti bojājumi, kas saistīti ar izstrādājuma materiālu kvalitāti vai ražošanas defektiem.

Garantija netiek piemērota:

Nepareizas apkopes gadījumā: par iegādātā ražojuma (iekārtas) ikdienas apkopi atbilda īpašnieks vai tā pilnvarota persona. Gadījumā, ja bojājums radās nepareizas apkopes rezultātā, pārdevējam ir tiesības nepiemērot garantiju.

Pārslodzes un nepareizas lietošanas gadījumā: t.i., ka ražojums (iekārta) lietojama pārkāpjot ekspluatācijas noteikumus, lietojot ne pēc uzdevuma vai tīšprātīgas bojāšanas rezultātā.

Modifikācijas gadījumā: Ja tika mēģināts demontēt, remontēt, modificēt ražojumu (iekārta) bez pārdevēja servisa piekrišanas vai tika pielietots nepareizs vai nekvalitatīvs aprīkojums.

Citos gadījumos: ja ražojums (iekārta) tika sabojāta ugunsgrēka, appliešanas ar ūdeni (plūdu), zemestrīces u.c. stihisko nelaimju gadījumos.

Garantija tiek piemērota tikai iekārtas bojājumam. UAB "Slaugivita" nav atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti citam īpašumam vai personām. Garantijas gadījumā jāiesniedz šis garantijas talons un pirkšanas dokumenta kopija.

Ar garantijas noteikumiem iepazīnos un piekrītu:

Pircēja paraksts _____

Garantijas apkalpošana tel.: 8 41 540204; 8 611 48081; 8 620 11394

1. Bojājums _____

Datums: _____

Pielietotas daļas: _____

Serviss _____

(Amats, vārds; uzvārds; paraksts)